

GEBRAUCHSANWEISUNG

CERUSTOP® - Ohrenöl

Was ist CERUSTOP-Ohrenöl?

CERUSTOP-Ohrenöl dient zur Entfernung von überschüssigem oder verhärtetem Ohrenschmalz (Cerumen) zur Vorbeugung von Entzündungen des äußeren Gehörganges.

Was ist in CERUSTOP-Ohrenöl enthalten?

Caprylic/Capric Triglycerid, Paraffinöl, Isostearyl Isostearat, Mandelöl, PEG-40 Sorbitan Peroleat, BHA/BHT, Vitamin E.

Welche Eigenschaften hat CERUSTOP-Ohrenöl?

CERUSTOP-Ohrenöl wird in den äußeren Gehörgang eingetropft, dringt in das Ohrenschmalz ein und macht dieses löslicher und daher leicht entfernbar. Verhärtetes Ohrenschmalz beeinträchtigt die Hörfähigkeit und kann zu Entzündungen im äußeren Gehörgang führen. Es sollte daher regelmäßig entfernt werden.

CERUSTOP-Ohrenöl ist auch für Hörgeräteträger geeignet.

CERUSTOP-Ohrenöl kann auch vor Ohrspülungen durch den Arzt angewendet werden.

Anwendungsgebiete – Wofür wird CERUSTOP-Ohrenöl verwendet?

- Zum Lösen und Entfernen von überschüssigem oder verhärtetem Ohrenschmalz.
- Zur Vorbeugung von Entzündungen des äußeren Gehörganges.
- Zur Reinigung der Ohrmuschel und des äußeren Gehörganges.

Es bestehen keine Bedenken gegen eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit.

CERUSTOP-Ohrenöl ist geeignet für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 3 Jahren.

Dosierung und Art der Anwendung – Wie sollen Sie CERUSTOP-Ohrenöl anwenden?

Zur Entfernung von überschüssigem oder verhärtetem Ohrenschmalz tropfen Sie - mit leicht zur Seite geneigtem Kopf - etwa eine halbe Pipette körperwarmes CERUSTOP-Ohrenöl in den äußeren Gehörgang. Um ein Herausrinnen des Ohrenöles zu verhindern, verschließen Sie das Ohr mit einem kleinen Wattebausch, wobei der Bausch nur locker eingelegt und niemals in den Gehörgang gepresst werden darf. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit spülen Sie das Ohr sanft mit warmem Wasser - wenn möglich mit der Handbrause.

Bei starken Verhärtungen wird eine Wiederholung des Vorganges empfohlen.

Zur zusätzlichen Reinigung der Ohrmuschel tropfen Sie einige Tropfen körperwarmes CERUSTOP-Ohrenöl auf einen Wattebausch und entfernen Sie anhaftendes Ohrenschmalz, Schmutz und Hautschuppen durch mehrmaliges Auswischen der Ohrmuschel. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Nach der Spülung mit Wasser empfehlen wir die Anwendung von NORMISON-Ohrentropfen zur raschen Trocknung und Wiederherstellung des natürlichen Säureschutzmantels der Haut des äußeren Gehörganges.

Wann sollen Sie CERUSTOP-Ohrenöl nicht verwenden?

- Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen Bestandteil des Präparates sind,
- bei entzündetem Gehörgang und perforiertem Trommelfell (Loch im Trommelfell).

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

CERUSTOP-Ohrenöl ist kein Arzneimittel. Bei Ohrenschmerzen oder stark haftenden Ohrenschmalzpfropfen sollten Sie unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen! Bei vorgeschädigtem Trommelfell/Mittelohr sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie CERUSTOP-Ohrenöl anwenden.

Keine Fremdkörper (z.B. Wattestäbchen) in den Gehörgang einführen!

Fläschchen stets verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Lagerungshinweise: Nicht unter 8 °C und nicht über 25 °C lagern.

Packungsgröße: Fläschchen zu 10 ml mit Tropfpipette.

Haltbarkeit: 36 Monate. Nach dem ersten Öffnen nicht länger als 8 Wochen verwenden.

Hersteller: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, A-1200 Wien

Vertrieb Österreich: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, A-1200 Wien

Vertrieb Deutschland: bene-Arzneimittel GmbH, D-81479 München

Stand der Information: August 2014

