

Mare Nasen- spray

- Isotone
Meersalzlösung
- Mit Meersalz und
gereinigtem Wasser

Zusammensetzung:

Isotone Meersalzlösung, die Meersalz und gereinigtes Wasser enthält.

Verpackungsgröße:

Inhalt: 20 ml
Ein Sprühstoß entspricht 0,07 ml

Hinweis:

Medizinprodukt ohne Konservierungsmittel und Treibgas

Anwendungsgebiete

Zur Befeuchtung der Nase z.B. bei trockener Raumluft durch Heizung oder Klimatisierung.
Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei erhöhter Belastung durch Staub, Pollen oder Rauch.
Zur unterstützenden Behandlung von Erkältungen (Schnupfen und verstopfter Nase).

Baby LUUF[®] Mare Nasenspray enthält reines Meersalz, dessen Salzgehalt an das optimale Niveau für den menschlichen Körper (Isotonisierung) angepasst wurde. Baby LUUF[®] Mare Nasenspray ist daher sehr gut verträglich. Die Schleimhäute werden nicht gereizt. Wertvolle Mineralien (Magnesium, Kalzium) bleiben bei der Aufbereitung des Meerwassers erhalten.

Wirkungsmechanismus

Natürliches Meerwasser reinigt und spendet Feuchtigkeit für die verstopfte und trockene Nase. Eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut verhindert die Austrocknung der Nase. Die Nase wird gereinigt und ihre Funktionalität als wichtiges Atmungsorgan und als Filter der Atemluft (filtert Staub, Keime, Pollen) wird dadurch unterstützt.

Dosierung und Art der Anwendung

Für Säuglinge und Kindern bis zu 2 Jahren

Baby LUUF[®] Mare Nasenspray sollte bei Raumtemperatur angewendet werden. Ein Sprühstoß Baby LUUF[®] Mare Nasenspray wird in jedes Nasenloch eingesprüht, je nach Bedarf mehrmals am Tag. Baby LUUF[®] Mare Nasenspray wird bei Säuglingen und Kindern am besten in sitzender Position verabreicht. Die Sprühdüse wird senkrecht in jedes Nasenloch eingeführt und die Pumpe betätigt.

Baby LUUF[®] Mare Nasenspray sollte nicht länger als 30 Tage kontinuierlich angewendet werden.

Gegenanzeigen

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Vor der Anwendung von Baby LUUF® Mare Nasenspray bei Säuglingen und Kleinkindern (bis zu 1 Jahr) mit Funktions- oder Reifungsstörungen der Atemregulation, z. B. Atemstillstand in der Vorgeschichte, sollte ein Arzt befragt werden.

Baby LUUF® Mare Nasenspray sollte bei Raumtemperatur angewendet werden.

Anwendung

1) Entfernen Sie den Verschluss und nehmen Sie dann die Sprühflasche in eine Hand. Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den oberen Teil der Pumpe bis zum ersten Sprühstoß mehrmals nach unten. Die Flasche sollte während der Vorbereitung auf den Gebrauch senkrecht gehalten werden.

2) Mehrmals täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch einsprühen. Säuglingen und Kleinkindern kann Baby LUUF® Mare Nasenspray am besten in sitzender Haltung verabreicht werden. Sprühöffnung senkrecht in jede Nasenöffnung einführen und dabei die Pumpe betätigen. Aus hygienischen Gründen sollten Sie die Pumpe nach jedem Gebrauch abwischen und das Produkt nicht mit anderen Personen teilen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Haltbarkeit

Das Spray kann nach der ersten Anwendung für 12 Monate verwendet werden.

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information 2022-09



Hersteller: HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, D-23562 Lübeck

Vertrieb: APOMEDICA, 8010 Graz, Austria



STERILE A

CE 0482

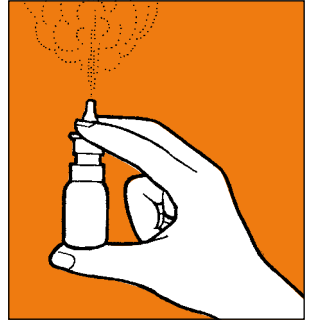


Abb. 1



Abb. 2