


Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Anwendung von Tetrisal® E beginnen. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Tetrisal® | E

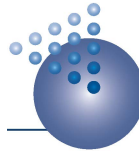

Was ist Tetrisal® E und wann wird es angewendet?

Tetrisal® E ist eine isotone Lösung bestehend aus natürlichem Meersalz und gereinigtem Wasser. Es enthält keine Konservierungsstoffe oder Treibmittel.

Tetrisal® E ist ein Medizinprodukt zur Befeuchtung von trockener und gereizter Nasenschleimhaut. Es kann zur unterstützenden Behandlung einer Erkältung oder eines allergischen Schnupfens eingesetzt werden. Das Nasenspray unterstützt die Linderung von Symptomen gereizter Nasenschleimhaut wie Niesen, verstopfter Nase und Juckreiz der Nase. Tetrisal® E reinigt sanft die Nasenhöhlen, entfernt Verkrustungen und reduziert schädliche Einflüsse von Allergenen und Feinstaub. Es unterstützt die Reduktion von Allergiesymptomen durch Ausspülen der Allergene. Tetrisal® E ist für Babies, Kinder und Erwachsene geeignet.

Wie wird Tetrisal® E angewendet?

Je nach Bedarf sollten Erwachsene und Kinder über zwei Jahren mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße von Tetrisal® E in jedes Nasenloch geben. Bei Säuglingen und Kindern unter zwei Jahren ist 1 Sprühstoß pro Nasenloch ausreichend. Kinder und Personen, die das Produkt nicht selbstständig anwenden können, sollten bei der Verwendung von Tetrisal® E Hilfestellung erhalten. Bevor Sie Tetrisal® E zum ersten Mal anwenden, nehmen Sie die Schutzkappe ab und pumpen 2-3-mal, um die Luft aus der Pumpe entweichen zu lassen. Schneiden Sie die Spitze des Sprühkopfes nicht ab. Wenn die Sprühfunktion beeinträchtigt ist (was passieren kann, wenn die Flasche nicht aufrecht gehalten wird), drücken Sie den Pumpmechanismus mehrmals in aufrechter Position.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Flasche.
2. Umschließen Sie mit Ihrem Zeige- und Mittelfinger den Sprühkopf des Nasensprays und platzieren den Daumen unter der Flasche. Lehnen Sie Ihren Kopf leicht nach vorne und halten ein Nasenloch mit der freien Hand zu.
3. Führen Sie die Spitze des Sprühkopfes vorsichtig in das freie Nasenloch ein und beginnen Sie, sanft einzuatmen.
4. Drücken Sie den Sprühkopf der Flasche zügig und fest nach unten, damit der Sprühnebel entweichen kann. Atmen Sie sanft durch das Nasenloch weiter ein.
5. Führen Sie die Spitze des Sprays nun in Ihr anderes Nasenloch ein und wiederholen die obigen Schritte.
6. Reinigen Sie den benutzten Sprühkopf mit einem sauberen und flusenfreien Tuch.
7. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Flasche.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei sachgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Tetrisal® E erforderlich. Aus hygienischen Gründen sollte das Nasenspray nur von einer Person verwendet werden. Tetrisal® E sollte bei Raumtemperatur verwendet werden.

Wie ist Tetrisal® E zu lagern?

Das Verfallsdatum von Tetrisal® E ist auf der Faltschachtel und auf dem Etikett der Flasche aufgedruckt. Tetrisal® E darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Tetrisal® E sollte unter 25°C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Tetrisal® E kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Inhalt von Tetrisal® E und weitere Informationen

20 ml Lösung

Ein Sprühstoß enthält 0,14 ml Lösung.

Das Nasenspray kann nach der ersten Anwendung 12 Monate lang verwendet werden.

Inhaltsstoffe

Natürliches Meersalz, gereinigtes Wasser

Datum der Information

April 2021

Hersteller

URSATEC GmbH
Marpinger Weg 4
66636 Tholey

Vertrieb

MIP Pharma GmbH
Kirkeler Straße 41
66440 Blieskastel

Bedeutung der Symbole



CE Symbol



Hersteller



Temperaturgrenzen



Chargennummer



Anzuwenden bis (Verfallsdatum)



Bitte Gebrauchsanweisung beachten



Nicht anwenden, wenn die Verpackung
beschädigt ist