

*Schützt, befeuchtet
und lindert belastete Augen.*

Gebrauchsanweisung

Lacri-Vision®

Benetzungslösung mit Hypromellose.

Beschreibung

Lacri-Vision® ist eine sterile wässrige Lösung mittlerer Viskosität mit 0,32% Hypromellose. Lacri-Vision® erfrischt und beruhigt belastete Augen und erhöht ihre Gleitfähigkeit. Lacri-Vision® hat eine schützende, befeuchtende Wirkung, die Trockenheitsgefühl auf Grund von Umwelteinflüssen, wie z. B. Klimaanlage, Tabakrauch, Staub, Reizungen durch Sonneneinstrahlung oder Müdigkeit sowie lange Bildschirmarbeit, rasch und lang anhaltend lindert. Die viskositätserhöhende Substanz Hypromellose bildet auf dem Auge einen optisch klaren Schutz- und Gleitfilm, der die physiologischen Funktionen der fehlenden Tränenflüssigkeit übernimmt. Aufgrund seiner Viskosität besitzt Lacri-Vision® eine lange Verweildauer und ermöglicht so eine komfortable Anwendungsfrequenz.

Lacri-Vision® hat folgende chemisch-physikalische Eigenschaften: es enthält eine klare Flüssigkeit, die zu allen Teilen wasserlöslich ist. Es entstehen keine Ausfällungen an metallischen Salzen oder organischen Residuen, die in die körpereigene Tränenflüssigkeit gelangen können. Der pH-Wert ist perfekt kompatibel mit dem Augengewebe und der Tränenflüssigkeit. Daher ist Lacri-Vision® besonders gut verträglich und beseitigt rasch das lästige Trockenheitsgefühl der Augen.

Zusammensetzung

Hypromellose 0,32%, Benzalkoniumchlorid 0,0045%, Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, gereinigtes Wasser.

Gebrauchshinweise

Drücken Sie das Fläschchen leicht zusammen und tropfen Sie 1–2 Tropfen in den unteren Bindehautsack. Falls erforderlich, können Sie mehrmals am Tag nachtropfen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie Lacri-Vision® nicht während des Tragens von weichen Kontaktlinsen. Falls die Anwendung zusammen mit weichen Kontaktlinsen aus medizinischen Gründen notwendig ist, warten Sie bitte mindestens 15 Minuten bis zum Wiedereinsetzen der Kontaktlinsen.
- Die Tropferspitze nicht berühren.
- Verwenden Sie Lacri-Vision® nicht bei Augenentzündungen.
- Verwenden Sie Lacri-Vision® nicht zusammen mit anderen Präparaten zur äußerlichen Anwendung am Auge.
- Bei bekannten Unverträglichkeiten gegenüber einem der Inhaltsstoffe, wenden Sie Lacri-Vision® nicht an.
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Überschreiten des Verfalldatums.
- 30 Tage nach dem ersten Öffnen sollten Sie Lacri-Vision® Augentropfen nicht mehr verwenden.

Aufbewahrung

Lacri-Vision® Augentropfen sollten nicht bei Temperaturen über 25 °C aufbewahrt werden. Vor Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.

Warnhinweis

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Packungsgröße

Tropfflasche mit 10 ml Lösung.

Medizinprodukt

Stand der Gebrauchsinformation

Oktober 2011

Hersteller

Bruschettini s.r.l.
Genua, Italien

Vertrieb

OmniVision GmbH, Lindberghstraße 7, 82178 Puchheim, Deutschland
Telefon +49 (0)89 840792-30, Telefax +49 (0)89 840792-40
www.omnivision.de, info@omnivision.de

OmniVision Ges.m.b.H., Eichenstraße 32, 1120 Wien, Österreich
Telefon +43 (0)1 81358-62, Telefax +43 (0)1 81358-63
www.omnivision.at, info@omnivision.at

CE
0373

STERILE A

ISO848
02/1011



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 7, 82178 Puchheim



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 7, 82178 Puchheim