

MULTI-GYN KOMPRESSEN ZUR ANWENDUNG IM ÄUSSEREN INTIMBEREICH

- Lindernder Effekt auf empfindsame Hautpartien im Intimbereich
- Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess
- Weiche, schützende Kompressen
- Ideal auch nach der Geburt

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur äußeren Anwendung auf Vulva, Schamlippen, Damm und Anus. Unterstützen den natürlichen Heilungsprozess im empfindlichen Intimbereich.

Multi-Gyn Kompressen wurden entwickelt, um den natürlichen Heilungsprozess bei Beschwerden im empfindlichen äußeren Intimbereich zu unterstützen. Ideal auch nach der Geburt.

WIE WIRKEN MULTI-GYN KOMPRESSEN?

Multi-Gyn Kompressen unterstützen den natürlichen Heilungsprozess im empfindlichen Intimbereich und schaffen Linderung. Ideal auch nach der Geburt. Auf jeder Komresse ist ein Gel aufgetragen. Dieses Gel basiert auf dem patentierten ZQR-Komplex. Jede Komresse bietet, auf den Intimbereich aufgelegt, einen weichen Schutz und hilft, optimale Bedingungen für den natürlichen Heilungsprozess zu schaffen. Die Außenseite der Komresse ist laminiert zum Schutz der Unterwäsche.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Briefchen öffnen, Komresse entfalten und mit der gelgetränkten Seite auf die betroffene Stelle auflegen. Lassen Sie die Komresse so lange Sie wollen – mindestens aber 10 Minuten – einwirken. Damit die Komresse an ihrem Platz bleibt, empfehlen wir, während der Anwendung enge Unterwäsche zu tragen. Wiederholen Sie die Anwendung mindestens zweimal täglich, bis Sie Linderung verspüren. Jede Komresse nur einmal verwenden. Nach Gebrauch aus hygienischen Gründen entsorgen.

Multi-Gyn Kompressen innerhalb einer Anwendungsperiode nicht länger als 30 Tage ununterbrochen verwenden.

MULTI-GYN KOMPRESSEN BASIEREN AUF NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN

Das Gel auf den Multi-Gyn Kompressen basiert auf natürlichen Inhaltsstoffen und enthält den ZQR-Komplex. Es ist frei von Duftstoffen, Hormonen und Stoffen tierischen Ursprungs.

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aqua, 1,3-Butylene glycol, Glycerin, Citric Acid, Laureth-9, Oleth-20, Xanthan Gum, Sodium hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Allantoin, Aluminium Hydroxide, Escin

Aktiver Inhaltsstoff: ZQR-Komplex: Patentierte, bio-aktive Polysaccharide gewonnen aus dem Blattgel der Aloe Barbadensis.

SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Es sind keine Gegenanzeigen für die Verwendung der Multi-Gyn Kompressen während Schwangerschaft und Stillzeit bekannt. Beraten Sie sich hierzu mit Ihrem Arzt.

Mehr Informationen unter www.multi-gyn.de, www.multi-gyn.at

HINTERGRUNDINFORMATION

Beschwerden im äußeren Intimbereich (anal und vaginal) sind häufiger als Sie denken. Viele Menschen kennen das Problem: Juckreiz, Reizungen, Empfindlichkeit, kleinere Gewebeerkrankungen, Schwellungen und Hämorrhoiden. Diese Beschwerden können viele verschiedene Ursachen haben, wie: mechanische Reibung (durch Textilien oder durch Sport), Menstruation, Geschlechtsverkehr, Infektionen, alters- oder hormonbedingte Veränderung des Gewebes, Verwendung von zu aggressiven Hygieneprodukten, Nebenwirkungen von Medikamenten oder chronische Verstopfung – übrigens eine häufige Erscheinung auch in der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Während dieser Phase ist der Druck auf den gesamten Intimbereich größer als üblich. Dieser Druck verursacht häufig kleine Risse im Gewebe (Analfissuren) oder anschwellende Gefäße (Hämorrhoiden). Während der Entbindung tritt zudem eine Überdehnung des Gewebes auf, die oft Risse und Verletzungen (z.B. Dammriss, Episiotomie) zur Folge hat. Diese kleinen Verletzungen können sehr unangenehm sein. Zudem treten diese Probleme bei vielen Müttern immer wieder auf. Multi-Gyn Kompressen sind eine effektive und natürliche Unterstützung bei diesen Beschwerden.