

# ACCU-CHEK® Softclix®

STECHHILFE

## GERÄTEBEDIENUNG

### LANZETTE EINLEGEN ODER WECHSELN

1. Ziehen Sie die Gerätekappe von Accu-Chek Softclix ab.




2. Falls sich eine Lanzette in der Stechhilfe befindet, schieben Sie den Auswerfer nach vorn. Die benutzte Lanzette wird ausgeworfen.



 Entsorgen Sie die gebrauchten Lanzetten sicher, so dass eine Verletzung an den Nadeln ausgeschlossen ist.


3. Schieben Sie eine neue Lanzette bis zum Anschlag in die Lanzettenhalterung ein.

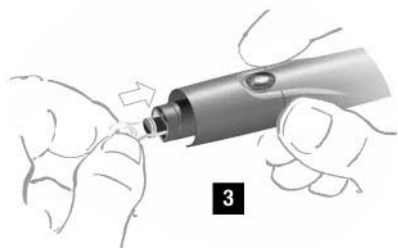

# ACCU-CHEK® Softclix®

## STECHHILFE

5. Stecken Sie die Gerätekappe der Stechhilfe wieder auf, bis sie hörbar einrastet. Dabei muss die Positionierungskerbe zur Mitte der halbmond-förmigen Aussparung für die Stechstufenanzeige hin ausgerichtet sein.

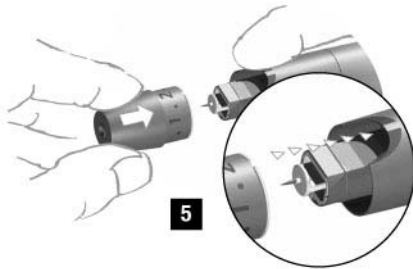


## VORBEREITUNG DER BLUTGEWINNUNG

Für die Blutgewinnung sind alle Finger sowie die Ohrläppchen geeignet. Wir empfehlen, das Kapillarblut an den Seiten der Fingerkuppen zu entnehmen, da das Schmerzempfinden an diesen Stellen am geringsten ist. Waschen Sie die Hände mit warmem Wasser und trocknen Sie sie gut ab. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und eine Verschmutzung der Einstichstelle vermieden.

## WAHL DER EINSTICHTIEFE

Moderne Blutzuckermessgeräte benötigen für die Messung nur noch sehr wenig Blut. Es reicht daher meist aus, eine geringe Einstichtiefe zu wählen. Damit wird der Einstichschmerz verringert, Nachschmerz wird seltener bzw. geringer, und die Vernarbung des Fingerspitzen Gewebes wird minimiert.

6. Durch Drehen der Gerätekappe wird die Einstichtiefe verändert.

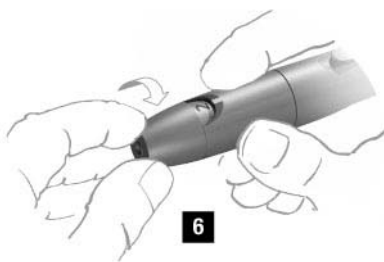

Wenn Sie Accu-Chek Softclix zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit der Stechstufe 1.

# ACCU-CHEK® Softclix®

## STECHHILFE

### BLUTGEWINNUNG

7. Überprüfen Sie zunächst, ob die von Ihnen gewünschte Stechstufe eingestellt ist. Drücken Sie den Spannkopf bis zum Anschlag.




Der Auslöseknopf darf dabei nicht gedrückt werden.

Die Stechhilfe ist gespannt, wenn in dem transparenten Auslöseknopf ein gelbes Feld sichtbar ist.

8. Setzen Sie das Gerät mit leichtem Druck an die gewünschte Einstichstelle und drücken Sie den Auslöser.

Der Spannkopf darf dabei nicht gedrückt oder blockiert werden.

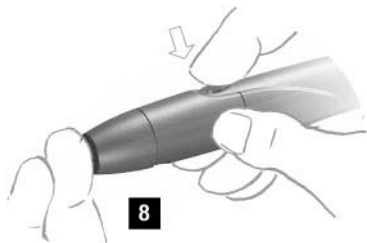

Unterstützen Sie die Bildung des Blutstropfens, indem Sie die Fingerkuppe zusammendrücken. Tritt hierbei nicht genügend Blut aus, versuchen Sie es schrittweise mit einer höheren Einstichtiefe. Jetzt können Sie die Blutzuckermessung entsprechend der Gebrauchsanleitung Ihres Blutzuckermessgerätes oder der Teststreifen durchführen.



Verwenden Sie für jede Blutentnahme eine neue Lanzette.


Sie vermindern damit die Infektionsgefahr, und die Blutgewinnung bleibt schmerzarm. Spannen Sie Accu-Chek Softclix erst unmittelbar vor der Blutgewinnung. Lagern Sie die Stechhilfe nicht bei extremen Temperaturen (z.B. im heißen Auto).

# ACCU-CHEK® Softclix®

STECHHILFE

## NACHBEHANDLUNG DER EINSTICHSTELLE

Wischen Sie die Einstichstelle mit einem trockenen, sauberen Papiertuch ab.  
Wir empfehlen, die Einstichstelle danach vor Verunreinigungen zu schützen.

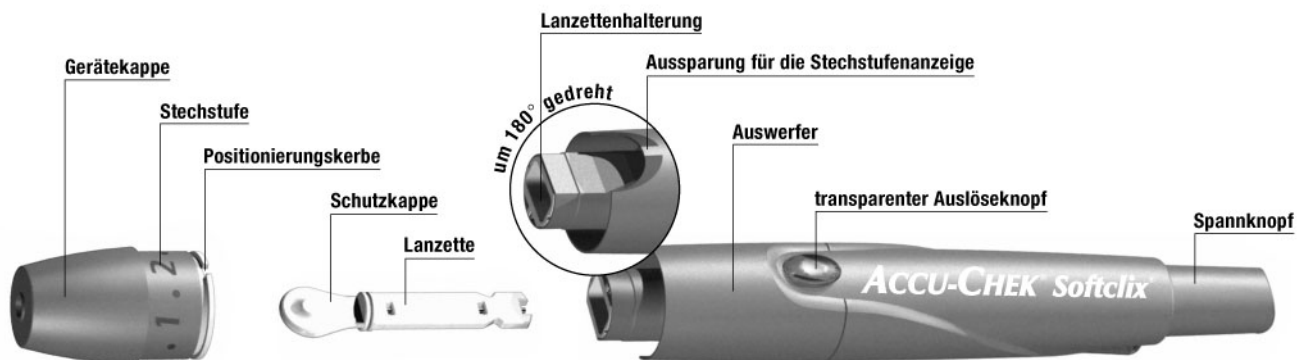

Accu-Chek Softclix wurde speziell für die einfache, nahezu schmerzfreie Gewinnung von Kapillarblut aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen entwickelt. Die Einstichtiefe ist präzise einstellbar und kann an die individuelle Hautbeschaffenheit angepasst werden.

## **DE** Gebrauchsanweisung

0 3317625001(01)  
V1/R1 (schwarz) – 06/02

### Sicherheitshinweis

Verwenden Sie Accu-Chek Softclix ausschließlich mit den Lanzetten Accu-Chek Softclix Lancet, da der Gebrauch von anderen Lanzetten mit Accu-Chek Softclix zu einem Funktionsausfall oder zu verminderter Funktionstüchtigkeit führen könnte.



Accu-Chek Softclix ist für die Patientenselbstkontrolle vorgesehen und darf nicht für die Blutgewinnung bei mehreren Personen verwendet werden, da hierbei Infektionsgefahr besteht.

### Reinigung und Desinfektion

Wischen Sie die Stechhilfe einmal pro Woche mit einem Tuch ab, das Sie zuvor mit Wasser oder 70%igem Äthylalkohol (in der Apotheke erhältlich) angefeuchtet haben. Zusätzlich sollte die Kappe von innen mit einem Wattestäbchen gereinigt werden, das ebenfalls mit 70%igem Äthylalkohol angefeuchtet wurde. Lassen Sie Accu-Chek Softclix anschließend gründlich trocknen.



# ACCU-CHEK® Softclix®

STECHHILFE

 Tauchen Sie das Gerät nicht in die Reinigungsflüssigkeit ein.

## Erklärung der Symbole



Diese Hinweise bitte besonders beachten.



Nur einmal verwenden.



Die Lanzetten dürfen nur bis zum aufgedruckten Datum verwendet werden.



Chargenbezeichnung



Die Lanzetten sind mit mindestens 25 kGy sterilisiert.

 <sup>0088</sup> Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte.

## Garantie

Es gelten die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zu dem gesetzlichen Gewährleistungsrecht beim Kauf von Verbrauchsgütern. Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an das Kunden Service Center.

## Patente

EP-B-0565970, US Re 35803, Deutsches Geschmacksmuster:  
DE 49900488.4

Die Accu-Chek Softclix Stechhilfe sowie ihr Gebrauch mit Accu-Chek Softclix Lancet ist in den USA und in vielen anderen Ländern für Roche Diagnostics patentrechtlich geschützt bzw. zum Patent angemeldet.

Sie haben mit dem Kauf die Berechtigung erworben, die Accu-Chek Softclix Stechhilfe ausschließlich mit Accu-Chek Softclix Lancet zu verwenden.

## Handelsformen

Accu-Chek Softclix Lancet,  
025 Lanzetten, Art. Nr. 0 3307492001  
200 Lanzetten, Art. Nr. 0 3307484001



**ACCU-CHEK<sup>®</sup>**  
**Softclix<sup>®</sup>**

---

*STECHHILFE*

---

## Trademark

ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks  
of a Member of the Roche Group.



## KONTAKT

**Roche Diagnostics GmbH**  
**D-68298 Mannheim, Germany**  
**Accu-Chek**  
**Kunden Service Center**  
**Tel: 0180 2000 165**

Manufactured by:  
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim  
Germany

[www.accu-chek.de/softclix](http://www.accu-chek.de/softclix)

