

Sofra-Tüll® classics  
Verbandtülle imprägniert

[Sanofi-Logo]

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

### **Sofra-Tüll® classics**

Sofra-Tüll classics ist eine angefeuchtete, feinmaschige Verbandtülle aus 100 % Polyester, imprägniert mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion „HPP“ (Hydrative Protective Polymers).  
Zusammensetzung der Imprägnierung: Propylenglykol, Glycerin, Aqua purificata, medizinischer Honig.

### **Inhalt**

Sofra-Tüll classics ist erhältlich in Packungen mit 10 und 50 Abschnitten (à 10 cm x 10 cm) bzw. in Packungen mit 10 Streifen (à 30 cm x 10 cm). Jeder Abschnitt bzw. Streifen (gefaltet) ist einzeln steril verpackt.

### **Anwendungsgebiete**

#### ***Wozu wird Sofra-Tüll classics angewendet?***

Sofra-Tüll classics wird angewendet zur Wundversorgung nach operativen Eingriffen sowie bei oberflächigen (reizlosen) Verletzungen der Haut.

Die imprägnierte Wundaufgabe verhindert das Verkleben flächiger Wunden mit dem Verband. Durch die feinmaschige hydrophobe Verbandtülle kann Sekret gut abfließen, ohne sich zu stauen und den Wundrand aufzuweichen. Verbandwechsel erfolgen weitgehend schmerzfrei und ohne Irritation von Wundrand und Wundgrund.

### **Gegenanzeigen**

#### ***Wann darf Sofra-Tüll classics nicht angewendet werden?***

Sofra-Tüll classics darf nicht angewendet werden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile,
- infizierten, tiefen, chronischen, fibrinbelegten oder nässenden Wunden.

### **Anwendung**

#### ***Wie wird Sofra-Tüll classics angewendet?***

Das Sachet wird an der mit Pfeilen gekennzeichneten Stelle geöffnet und der Abschnitt bzw. Streifen mit einer Pinzette entnommen. Der Aufdruck auf dem Sachet kennzeichnet die Wundseite der Tülle. Sofra-Tüll classics kann auf die Wundgröße zugeschnitten werden und

direkt auf die gereinigte Wunde aufgebracht werden. Danach wird Sofra-Tüll classics mit einem sterilen Verband abgedeckt und fixiert.

Hinweis:

Anwendungsdauer bis 30 Tage. Die Seite der Tülle, die zur bedruckten Seite der Einzelverpackung zeigt, wird auf die Wunde gelegt. Packungen mit beschädigter Einzelversiegelung dürfen nicht verwendet werden.

**Nebenwirkungen**

Sofra-Tüll classics ist frei von Wirkstoffzusätzen und gut verträglich.

**Haltbarkeit/Aufbewahrungshinweise**

Sofra-Tüll classics soll liegend aufbewahrt und nicht über 25°C gelagert werden.

Das Verfalldatum dieses Medizinproduktes ist auf der Verpackung aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt der Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Stand der Information**


September 2012

Vertrieb:  
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  
65926 Frankfurt am Main


((gefülltes Fabriksymbol))  
Biocell Gesellschaft für Biotechnologie mbH  
Oberstaat 6  
51766 Engelskirchen / Germany

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 / DIN ISO 13485

[CE 0481]

((Symbol slashed 2  : Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.))

((Symbol "Regenschirm": Vor Feuchtigkeit schützen.))

((Symbol Thermometer  : Temperaturbegrenzung 0-25 °C))

**STERILE | R**