



Dosierspray

Wofür Olynth Salin Dosierspray angewendet wird

Olynth Salin Dosierspray ist geeignet für Säuglinge, Kinder, Schwangere und Erwachsene.

Olynth Salin Dosierspray enthält eine isotonische Salzlösung ohne Konservierungsstoffe.

Olynth Salin Dosierspray wird angewendet bei verstopfter Nase sowie trockenen oder gereizten Nasenschleimhäuten, hervorgerufen durch Schnupfen und Erkältung, Nasennebenhöhlenentzündung, Allergien inklusive Heuschnupfen oder eine Nasenoperation. Es wirkt, indem es die Nase reinigt und die Nasenschleimhäute wieder befeuchtet.

Schnupfen und Erkältung

Bei Schnupfen und Erkältung ist die Nasenschleimhaut gereizt und es kommt zu einer vermehrten Schleimproduktion. Die Folge ist eine laufende und verstopfte Nase. Olynth Salin Dosierspray hilft, die Verstopfung der Nase zu reduzieren, indem es den Schleim verflüssigt und abfließen lässt.

Olynth Salin Dosierspray kann zum Schlafen und beim Füttern von Säuglingen und Kleinkindern, die an Schnupfen oder Erkältung leiden, unterstützend angewendet werden, da es auf sanfte Weise den Schleim ausspült, der die Nase verstopft, damit Ihr Kind besser atmen kann.

Nasennebenhöhlenentzündung:

Olynth Salin Dosierspray befreit temporär die durch eine Nasennebenhöhlenentzündung verstopfte Nase, indem es den Schleim, der die Verstopfung verursacht, effektiv verflüssigt und ausspült.

Allergien inklusive Heuschnupfen

Olynth Salin Dosierspray hilft bei regelmäßiger Anwendung, Reizstoffe auszuspülen, die Allergien wie Heuschnupfen auslösen können. Durch die Reinigung der Nasenschleimhaut spült es Reizstoffe aus und hilft so, allergiebedingte Symptome wie eine laufende oder verstopfte Nase zu minimieren und die normale Reinigungsfunktion der Nasenschleimhaut wiederherzustellen.

Nach einer Nasenoperation

Olynth Salin Dosierspray hilft, nach einer Nasenoperation trockenes Blut und Schleimkrusten zu entfernen.

Wie Sie Olynth Salin Dosierspray anwenden sollten

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie Olynth Salin Dosierspray korrekt anwenden:

- Nur zur Anwendung in der Nase bestimmt.

Erste Anwendung

- Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung vor dem Öffnen beschädigt ist.
- Die Schutzkappe abnehmen.
- Vor der ersten Anwendung oder wenn das Produkt länger als eine Woche nicht verwendet wurde, testweise in die Luft sprühen, um die Funktionstüchtigkeit der Pumpe zu überprüfen.
- Die Flasche vom Körper weghalten und pumpen, bis Sie einen Sprühnebel sehen.

Wie, in welcher Menge und wie oft anwenden

Säuglinge und Kleinkinder bis zu 2 Jahren

- Ihr Kind hinlegen und seinen Kopf auf eine Seite drehen.
- Sprühkopf in ein Nasenloch einführen und einmal pumpen.
- Sprühkopf aus dem Nasenloch entfernen, die Flasche in eine aufrechte Position bringen und einmal pumpen, um den Pumpmechanismus wieder zu füllen.
- Die Anwendung im anderen Nasenloch wiederholen.
- Je nach Bedarf **einen Sprühstoß** in jedes Nasenloch einbringen.

Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene

- Sprühkopf in das Nasenloch einführen. Flasche möglichst senkrecht halten.
- Tief in das Nasenloch sprühen, indem Sie den Sprühkopf einmal drücken. Es empfiehlt sich, über dieses Nasenloch einzuatmen, während Sie das andere verschlossen halten.
- Die Anwendung im anderen Nasenloch wiederholen.
- Je nach Bedarf **ein bis zwei Sprühstöße** in jedes Nasenloch einbringen.





Nach Gebrauch des Nasensprays

- Den Sprühkopf mit einem sauberen Tuch abwischen und die Schutzkappe wieder aufsetzen.

Warnhinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verwenden Sie Olynth Salin Dosierspray nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Natriumchlorid oder einem der anderen Inhaltsstoffe.
- Eine Flasche sollte jeweils nur von einer Person verwendet werden, da die Verwendung der Sprühvorrichtung durch mehrere Personen zur Ausbreitung von Infektionen führen kann.
- Wenn Ihre Beschwerden länger als 14 Tage anhalten oder sich verschlimmern oder wenn neue Beschwerden auftreten, beenden Sie die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sollten im Zusammenhang mit diesem Produkt schwere Nebenwirkungen auftreten, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Gesundheitsbehörde:

Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte
Abt. Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Telefax: 0228/207 5300
E-Mail: medizinprodukte@bfarm.de

Wie Sie Olynth Salin Dosierspray aufbewahren sollten

Unter 25 °C lagern. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum (☞). Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Notieren Sie das Datum, an dem Sie das Behältnis zum ersten Mal geöffnet haben, auf dem Behältnis. 12 Wochen nach dem ersten Öffnen entsorgen.

Zusammensetzung: Wasser, Natriumchlorid (0,8 %), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumhydrogencarbonat.

REF [PR-016807]

Eine Flasche enthält ca. 100 Sprühstöße.
15 ml



Kenvue Germany GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss, Deutschland
Tel. 00800 260 260 00 (kostenfrei)

Version 6, September 2025, DE
© Kenvue Germany GmbH 2025



0123

STERILE A**MD**

Erläuterung der Symbole:



Hersteller

LOT

Chargenbezeichnung



Verfallsdatum

MD

Medizinprodukt

STERILE A

Sterilisiert mit aseptischen Verfahren

REF

Katalognummer



Oberer Temperaturgrenzwert



Herstellungsdatum

Einzelpatient,
Mehrfachverwendung