

Gebrauchsinformation

Lindert und erfrischt müde, belastete Augen.

Zur besseren Befeuchtung der Augen,
insbesondere beim Tragen von Kontaktlinsen.

Herba-Vision® Kamille *plus*

- Kamillenextrakt
- Malvenextrakt

15 ml Benetzungslösung für das Auge mit Kamillenextrakt und Malvenextrakt.

Herba-Vision® Kamille plus Augentropfen revitalisieren und erfrischen müde Augen und befeuchten empfindliche Augen. Sie bringen Linderung bei belasteten und überanstrengten Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, den Aufenthalt in verräuchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

Herba-Vision® Kamille plus kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Zusammensetzung:

100 ml isotonische Pufferlösung (ph 7,2) enthalten

1 g Kamillenextrakt, 1 g Malvenextrakt, 0,12 g Natrium-EDTA

Anwendung:

Bei Bedarf mehrmals täglich (auch während des Tragens von Kontaktlinsen) 2–3 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Für Kontaktlinsenträger:

Vor dem Einsetzen der Kontaktlinse 1–2 Tropfen auf die Kontaktlinse auftropfen. Während des Tragens der Kontaktlinsen bei trockenen Augen 2–3 Tropfen auf die Kontaktlinse auftropfen.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise:

Bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Öffnen 90 Tage haltbar. Nicht nach Überschreiten des Verfalldatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Nach Gebrauch gut verschließen. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information:

Juni 2015

Medizinprodukt

CE 0051

STERILE A

HERGESTELLT OHNE
TIERVERSUCHE



Hersteller:

Omisan farmaceutica
via Galilei – Guidonia M. (Rm) Italy

Vertrieb Deutschland:

OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 89 84 07 92-30
Telefax +49 89 84 07 92-40
info@omnivision.de
www.omnivision.de

Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien
Österreich



OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9
82178 Puchheim, Deutschland