



Selbstaftende Pflaster Bandage



**Optimal
geeignet bei:**
Finger-/ Schnitt-/
Gelenkverletzungen
und eingerissenen
Fingernägeln

- elastisch
- reibar
- wasserbeständig

Erhaltlich in allen gut sortierten Apotheken.



www.hoega.de

Schnittwunden? Die schnelle und optimale Versorgung!

Selbstaftende Pflaster Bandage

Schnitt-/ Gelenkverletzungen



1. Verband auspacken und bei Bedarf ein Wundkissen unterlegen (z. B. Kompresse). Wundkissen fixieren.



2. Die Verletzung mit dem Fingerflex umwickeln. Der Verband klebt nicht auf der Haut und ist somit ideal für Kinder geeignet.



3. Verband abreißen, feststreichen und fixieren.
Fertig!

Fingerkuppenverletzungen



1. Wundkissen auflegen, den Fingerflex mehrmals um den Finger und über die Fingerkuppe hinaus wickeln.



2. Zur Verletzung hin umknicken und gut anstreichen.



3. Den Fingerflex zurück zum Anfang wickeln und abreißen.
Fertig!

Stand: 2019