
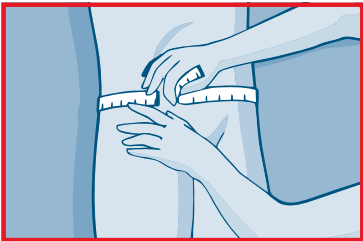


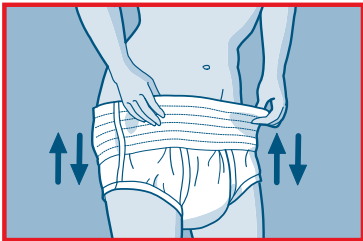

Anlegehinweise Attends Pull-Ons

<p>1</p> 	<p>Vorbereitung</p> <p>Messen Sie jeweils den Hüft- und den Taillenumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.</p>	<p>2</p> 	<p>Verwendung</p> <p>Ziehen Sie die Attends Pull-Ons Einmalhosen wie normale Unterwäsche an und aus.</p>
<p>3</p> 	<p>Passform</p> <p>Aufgrund der flexiblen Passform passt sie sich ähnlich wie normale Unterwäsche dem Körper an. Hautfreundlich dank atmungsaktiver Materialien.</p>	<p>4</p> 	<p>Nach Gebrauch</p> <p>Die Pull-Ons kann zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden.</p>

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die Größe der Pull-Ons aufgrund des Hüft- bzw. Taillenumfangs. Nehmen Sie den größeren von beiden Werten.
- Wählen Sie die Saugstärke je nach Ausprägung der Blasenschwäche: Saugstärke 3 ist geeignet bei leichter, 5 bei mittlerer Inkontinenz, 8 für sehr große Harnverluste und komplette Blasenentleerungen. Die farbigen Streifen am Bund müssen bei den Größen M, L und XL immer hinten sein.
- Pull-Ons Einmalhosen sind auch geeignet für Personen, die Einlagen ablehnen.

Anlegen

- Ziehen Sie das Produkt so an, dass die Farbstreifen am Bund hinten sind (bei den Größen M, L und XL).

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Pull-Ons M, L und XL ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.