

INHALATOR

2-teilig aus Kunststoff

INHALER
2-piece plastic



Dr. JUNGHANS®
MEDICAL-PRODUKTE • BABYARTIKEL

INHALATOR

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Der von der Firma Dr. Junghans angebotene Inhalator gewährleistet eine effektive und wirksame Inhalationsbehandlung.

Entnehmen Sie den Inhalator der Verpackung. Stellen Sie das Unterteil auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage etwa in Essstischhöhe und das Oberteil daneben. Füllen Sie jetzt entweder das heiße Wasser (**max. 90°C**) ein und geben Sie danach das Inhalat (nicht inbegriffen) zu oder befüllen Sie es mit einer fertigen Inhalationslösung. Stecken Sie nun das Oberteil auf das Unterteil und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis die Laschen einrasten. Achten Sie immer auf einen festen Sitz des Oberteils. Jetzt können Sie mit dem Inhalationsvorgang beginnen. Nach Beendigung des Vorgangs trennen Sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Ober- und Unterteil und reinigen Sie diese. Bitte beachten Sie hierzu die unten stehenden Reinigungshinweise.

Sicherheitshinweise: Um das Einatmen zu heißer Dämpfe zu vermeiden, gehen Sie zu Beginn der Anwendung schrittweise und vorsichtig mit der Nase an die Öffnung heran. Die Einfüllhöhe sollte max. 5cm bzw. 500ml betragen.

Vermeiden Sie das Bewegen des Inhalators nach dem Einfüllen des heißen Wassers. Benutzen Sie zum Festhalten die dafür vorgesehenen Griffe an den Seiten des Inhalators.

VORSICHT: Verbrühungsgefahr!

Reinigungshinweise: Spülen Sie den Inhalator nach der Benutzung mit warmen Wasser aus. Die Reinigung kann auch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder im Geschirrspüler erfolgen. Keine Scheuermittel oder aggressiven Reiniger verwenden.

Gefahrenhinweise: Lassen Sie den Inhalator nicht unbeaufsichtigt stehen. Kinder sollen den Inhalator nur im Beisein eines Erwachsenen verwenden. Durch Anstoßen oder Kippen kann heiße Flüssigkeit aus dem Inhalator austreten, was zu Verbrühungen führen kann. Stellen Sie deshalb den Inhalator immer kippsicher auf. Kein Spielzeug! Nicht zum Verzehr geeignet! Achten Sie vor jeder Anwendung auf äußerliche Schäden. Bitte benutzen Sie keine defekten Produkte. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Gefahrenhinweise vor der Anwendung sorgfältig durch.

ACHTUNG: Der Inhalator ist **NICHT** zur Anwendung in der Mikrowelle geeignet.

Zu allen Fragen bezüglich der Anwendung und der Inhalate bzw. Inhalationszusätze wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie unter:
www.dr-junghans.de/de/information/downloads