

Wie funktionieren Dr. Scholl's Hühneraugen Pflaster?

Dr. Scholl's Hühneraugen Pflaster wirken direkt an der betroffenen Stelle und entfernen Hühneraugen effektiv. Die Wirkstoffpflaster enthalten den keratolytischen Wirkstoff Salicylsäure. Dieser löst Hühneraugen auf und entfernt sie. Das Dr. Scholl's Pflastersystem schützt dabei die umliegende gesunde Haut. Die Pflaster bieten zudem Schutz vor Reibung und reduzieren Druck – für sofortige Schmerzlinderung.



Anwendung:

1. Weichen Sie das Hühnerauge vor der Anwendung 5 Minuten in warmem Wasser ein. Reinigen und trocknen Sie die Haut vor der Anwendung und stellen Sie sicher, dass der betroffene Bereich frei von Cremes und Ölen ist.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie, platzieren Sie das Pflaster mit dem Salicylsäure-Wirkstoffpunkt mittig auf dem Hühnerauge und streichen Sie die Ränder gut fest.
3. Lassen Sie das Pflaster so lange kleben, bis es anfangt sich zu lösen. Entfernen Sie es nach maximal 48 Stunden.
4. Weichen Sie die betroffene Stelle 5 Minuten in warmem Wasser ein, bevor Sie die aufgeweichte Haut entfernen.



Diesen Vorgang wiederholen Sie bei Bedarf bis zu 14 Tage.



Warnhinweise

- Es können Hautschäden auftreten, wenn gesunde Haut mit Salicylsäure in Kontakt kommt. Das Wirkstoffpflaster enthält 40% Salicylsäure.
- Nur zur äußeren Anwendung. Nicht herunterschlucken und nicht in der Nähe der Augen oder bei tiefen Wunden mit engen Öffnungen verwenden.
- Sorgfältig entsorgen, um einer Kreuzkontamination vorzubeugen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gegenanzeigen

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Diabetiker sind, auf Salicylsäure überempfindlich reagieren oder unter schlechter Durchblutung leiden.
- Schwangere und Kinder sollten das Produkt nur nach ärztlicher Erlaubnis verwenden.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde (DE: BfArM, AT: AGES; CH: Swissmedic) gemeldet werden.

Kontakt

www.scholl.com

Dr. Scholl's und Scholl sind Marken oder eingetragene Marken der Scholl's Wellness Company.



Dieselbe großartige Marke, der Sie seit über 100 Jahren vertrauen!

Text prepared: 21012025
Revision number: 05



4 006671 031011 >



REF 7007916



Dr. Scholl's

4x Druckschutzpflaster mit integriertem Wirkstoffpflaster



Dr. Scholl's

HÜHNERAUGEN PFLASTER

SCHNELL & EFFEKTIV
HÜHNERAUGEN
ENTFERNEN



- Sofortige Schmerzlinderung
- Gezielte Wirkung
- Ideal für Hühneraugen an den Zehen
- Gepolsterte Pflaster zum Schutz vor Druck

Salicylsäure
40 % w/w

EC REP I E C REP LTD, 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2,
D02 R744, IRELAND
Pharmaplast S.A.E. Amria free zone 235112 Alexandria Egypt,
Made in Egypt

Scholl's Wellness Company B.V.,
Luna Arena, Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam, The
Netherlands

LOT