

OmniTears® Lidspray N

Liposomales Lidspray mit Dexpanthenol ohne Konservierungsmittel

Inhaltsstoffe:

Aqua Purificata, Soja-Lecithin, Natriumchlorid, Ethanol, Dexpanthenol, Vitamin A - Palmitat, Vitamin E

Anwendungsgebiete:

OmniTears® Lidspray N stabilisiert die Lipidschicht des Tränenfilms, verbessert die Befeuchtung der Augen und der Augenlider.

Anzuwenden bei umweltbedingten Befindlichkeitsstörungen der Augen wie Trockene Augen, gereizte Augenlider, Fremdkörpergefühl oder juckenden und brennenden Augen.

Liposomen und Dexpanthenol befeuchten die Augenpartie und pflegen ergänzend als vorbeugender Schutz der Haut.

Gegenanzeigen und Überempfindlichkeitsreaktionen:

OmniTears® Lidspray N sollte bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Potentielle Überempfindlichkeitsreaktionen können in sehr seltenen Fällen in Form von temporären Reizungen auftreten. Die (Haut-) Reizungen (z. B. Rötung, Schwellungen) sind auf den Anwendungsbereich begrenzt und können beispielsweise von einer brennenden Empfindung oder Juckreiz begleitet sein. Sie treten akut auf, sind von leichter Ausprägung und klingen nach Meiden des Präparates rasch und folgenlos ab.



Anwendung:

OmniTears® Lidspray N wird mit je 1–2 Sprühstößen auf die geschlossenen Augenlider aufgebracht. Das Produkt nicht in das geöffnete Auge sprühen, mit dem Sprühkopf nicht die Augenoberfläche berühren,

sondern ca. 10 cm Abstand halten. Bei Verwendung von Augenkosmetika sollte OmniTears® Lidspray N vor dem Schminken und nach dem Abschminken verwendet werden. OmniTears® Lidspray N kann aber grundsätzlich auch bei aufgetragener Augenkosmetik angewendet werden. Es sollte dann jeweils nur 1 Sprühstoß aus etwas größerem Abstand (ca. 20 cm) aufgetragen werden.

OmniTears® Lidspray N erhöht den Komfort beim Tragen von Kontaktlinsen.

Im Allgemeinen empfiehlt es sich OmniTears® Lidspray N 3–4 mal täglich anzuwenden. Bei starken Befindlichkeitsstörungen kann OmniTears® Lidspray N bedenkenlos öfter angewendet werden.

Hinweise:

Die Flasche kann auch von mehreren Personen verwendet werden, da es keine Kontaminierung gibt.

OmniTears® Lidspray N sollte nicht gleichzeitig mit Augenarzneimitteln angewandt werden. Sollten außer OmniTears® Lidspray N weitere Produkte zur Anwendung am Auge verabreicht werden, so sollte zwischen den beiden Anwendungen grundsätzlich ein Zeitabstand von 10 Minuten eingehalten werden.

Vor Benutzung auf korrekte sitzenden und unverletzten Verschluss der Sprühpumpe achten. Die Flasche wird großzügig abgefüllt, da aus technischen Gründen eine Restmenge verbleibt. Es ist gewährleistet, dass der angegebene Inhalt entnommen werden kann.

Inhalt der Packung, Aussehen und Geruch:

OmniTears® Lidspray N ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opaleszente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichen Geruch nach Lecithin.

Es kann im Laufe der Lagerung zum Auftreten von bräunlichen Trübungen/Ablagerungen, insbesondere innerhalb des Pumpenkörpers im Bereich der Feder, kommen. Dies ist ein Charakteristikum der enthaltenen pflanzlichen Bestandteile (Soja-Lecithin), das aber ohne Einfluss auf die Wirksamkeit oder Verträglichkeit ist.

Haltbarkeit und Aufbewahrung:

Kühl und trocken lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach erstem Gebrauch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Bei Erstverwendung können 3–4 Pumpstöße zur Befüllung des Steigrohres notwendig sein.

Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7

6300 Zug
Schweiz

Vertrieb:

OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 89 84 07 92-30
Telefax +49 89 84 07 92-40

25°C
2°C

Stand der Information: Oktober 2018

CE 0482