

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender



Nasen Spülung

mit Meersalz

Medizinprodukt , Meerwasser Nasenspray

100 ml

Liebe Patientin, lieber Patient,

Abtei Nasen Spülung mit Meersalz ist eine isotonische Lösung mit natürlichem Meerwasser zur Anwendung bei Schnupfen, Allergie und zur täglichen Nasenhygiene. Gebrauchsfertig - ganz ohne Anrühren. Abtei Nasen Spülung mit Meersalz lindert Schnupfensymptome. Täglich angewendet, hilft Abtei Nasen Spülung mit Meersalz, Erkältungen und Allergien vorzubeugen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, sie enthält wichtige Informationen, die Sie vor der Anwendung von Abtei Nasen Spülung mit Meersalz beachten müssen.

Die gebrauchsfertige, isotonische Lösung reinigt und befreit die Nase bei Schnupfen und Allergie auf sanfte Weise. Allergene, Viren und Bakterien werden ausgespült.

Abtei Nasen Spülung mit Meersalz dient zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut und trägt zu einer gesunden Nasenatmung bei.

100 % natürlich.

Ohne Konservierungsstoffe.

Dosierungsanleitung:

- Zur täglichen präventiven Anwendung: 1-2 mal täglich 1-2 Sekunden in jedes Nasenloch sprühen
- Zur Anwendung bei Schnupfen: 4-6 mal täglich 1-2 Sekunden in jedes Nasenloch sprühen

Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren.

Kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Gebrauchsanweisung:

Wenn von Kindern verwendet, wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.

1. Befestigen Sie den Nasenadapter am Behälter.
2. Neigen Sie den Kopf zur Seite.
3. Führen Sie die Sprühöffnung vorsichtig in das obere Nasenloch ein und drücken Sie einmal fest für 1-2 Sekunden auf den Sprühkopf.
4. Lassen Sie die Lösung einige Sekunden einwirken.
5. Wiederholen Sie dies bei dem anderen Nasenloch.
6. Nase putzen.

Waschen Sie den Nasenadapter nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser und trocknen Sie ihn sorgfältig ab.

Bei Irritationen in der Nase, kann während der Anwendung ein vorübergehendes Kribbeln auftreten. Falls nach

10 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte der Rat eines Arztes oder Apothekers eingeholt werden. Die Benutzung eines Produktes durch mehrere Personen kann zur Verbreitung von Infektionen führen.

Zusammensetzung:

Meerwasser, gereinigtes Wasser.

Isotonische Meerwasser-Lösung, enthält 9 g/l NaCl. Ohne Konservierungsstoffe und chemische Zusätze.

Nach Ablauf des Verfallsdatums darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Falls die Produktverpackung beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

ACHTUNG:

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern halten.

Weitere Informationen:



Hersteller:

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo – France

Vertreiber:

Abtei OP Pharma GmbH
Abtei 1
D-37696 Marienmünster

Stand der Information:

Juni 2020



175