

## **GYNELLA® Natal Ferti Gel**

**GYNELLA® Natal Ferti Gel ist ein vaginales Gel, das im Falle von Kinderwunsch angewandt werden kann.**

Die Zusammensetzung wurde entwickelt, um:

- eine optimale Umgebung für Spermien zu schaffen,
- dazu beizutragen, einen für die natürliche Empfängnis geeigneten pH-Wert aufrechtzuerhalten,
- eine Osmolarität zu erhalten, die mit der Samenflüssigkeit kompatibel ist.

GYNELLA® Natal Ferti Gel ist ein nichtfärbendes Gel, das Konservierungsmittel enthält, die für den Anwendungszweck geeignet sind, und das keine Parabene, Silikone und Mineralöle enthält.

### **Anwendung:**

Das Produkt sollte während der Ovulationsphase, insbesondere während der fruchtbarsten Tage der Periode angewandt werden (13. 14. und 15. Tag). Das Gel sollte 5 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr angewandt werden.

- Vor dem Geschlechtsverkehr die Verschlusskappe des Einwegapplikators entfernen.
- Die Spitze der Applikatortube in die Vagina einführen.
- Den Einwegapplikator zusammendrücken, bis dieser vollständig entleert ist.
- Entsorgen Sie den Einwegapplikator.

Es ist ratsam, das Produkt einmal täglich oder öfter gemäß den Anweisungen des Arztes anzuwenden.

### **Zusammensetzung:**

Wasser, Glukose, Fruktose, Natriumhyaluronat, Magnesiumcitrat, Calciumpyruvat, Sorbit, Milchsäure, Zitronensäure, Inositol, Kaliumcitrat, Natriumbikarbonat, Zinkgluconat, Carnitin, Kreatin, Natriumchlorid, DMDM-Hydantoin, Natriumhydroxid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyethylzellulose.

### **Warnhinweise:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Einwegapplikator: Der Inhalt jeder Tube sollte in einer einmaligen Anwendung verbraucht werden. Die Applikatoren sollten ordentlich verschlossen und geschützt vor Licht und Hitzequellen aufbewahrt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Mindesthaltbarkeitsdatum gilt für ordentlich gelagerte Ware. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Das Produkt ist nicht steril. Es handelt sich nicht um ein Produkt zur Empfängnisverhütung. GYNELLA® Natal Ferti Gel hat keine spermienabtötende Wirkung. Nicht verwenden bei beschädigter Vaginalschleimhaut, direkt nach operativen Eingriffen oder bei akuten vaginalen Infektionen. Nicht schlucken. Kontakt mit den Augen vermeiden. Im Falle von bekannten Überempfindlichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit quartären Ammoniumverbindungen. Die Missachtung dieser Warnhinweise und der Anwendungshinweise kann die Wirkweise des Produkts beeinträchtigen und kann bestehende Probleme verschlimmern sowie bisher nicht vorhandene Probleme hervorrufen. Verwenden Sie das Produkt nicht für eine Dauer von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt oder Apotheker mögliche Nebenwirkungen mitteilen, die nicht in diesem Beipackzettel beschrieben sind.

**Nebenwirkungen:**

Bei einer normalen Verwendungsweise sind derzeit keinerlei unerwünschte Nebenwirkungen in Bezug auf die Verwendung von GYNELLA® Natal Ferti Gel bekannt. Die Verträglichkeit wurde bestätigt. Falls es dennoch zu Irritationen oder allergischen Reaktionen kommen sollte, stoppen Sie die Verwendung und kontaktieren Sie Ihren Arzt/Gynäkologen.

**Verpackung:**

6 Einwegapplikatoren á 5 ml.


**Hersteller:**

**Velit Biopharma S.r.l.**, Piazza Cavour 3  
20121 Mailand, Italia

**Distributeur:**

**HEATON k.s.**, Na Pankráci 332/14,  
140 00 Prag 4, Tscheschische Republik

**Datum der Revision des Textes:** September 2021

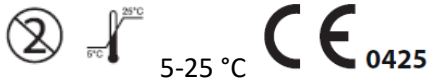

*Dieses Medizinprodukt darf nicht dem Abwasser oder dem Hausmüll zugeführt werden. Bitte fragen Sie Ihren Apotheker bezüglich der Entsorgung nicht benötigter Artikel. Dies dient dem Schutz unserer Umwelt.*