



# STIFT GEGEN WARZEN

Der WARTNER® Stift entfernt durch die Mikro-Dosierungstechnologie gewöhnliche Warzen und Dornwarzen schnell und effektiv. Es ist nur eine Anwendung pro Woche erforderlich. Der Wartner® Stift ist für die ganze Familie geeignet, einschließlich Kindern ab 4 Jahren.



**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON WARTNER® DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH. NUR VORSCHRIFTSGEMÄß VERWENDEN.**

## HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU WARZEN

Warzen sind harmlose Wucherungen auf der Haut, die durch humane Papillomaviren (HPV) ausgelöst werden. Es gibt verschiedene Arten von Warzen. Die häufigsten sind jedoch die sogenannten gewöhnlichen Warzen. Sie bestehen aus einem inneren Kern, dessen Gewebe mit Blutgefäßen versorgt und von äußeren Hautschichten bedeckt wird.

Gewöhnliche Warzen sind durch ihre raue, „blumenkohlartige“ Oberfläche leicht zu erkennen. Dornwarzen sind den gewöhnlichen Warzen ähnlich, treten aber hauptsächlich an der Fußsohle, Fersen oder Zehen auf. Sie sind in der Regel flacher und schmerzen oft durch den Druck während des Gehens.

Gewöhnliche Warzen und Dornwarzen treten bei 7 bis 10 % der Gesamtbevölkerung auf. Sie sind sehr ansteckend und können bei einem schwachen Immunsystem häufiger vorkommen. Durch direkten Kontakt mit der infizierten Stelle können sie von einer Person auf die andere bzw. von einer Körperstelle auf die andere übertragen werden. Über 50 % der Warzen verschwinden ohne Behandlung innerhalb von zwei Jahren. Allerdings entscheiden sich viele gleich beim ersten Auftreten für eine Behandlung, denn Warzen können unschön aussehen oder im Fall von Fußwarzen schmerzhaft sein.

Traditionell gibt es zwei Hauptbehandlungsmethoden bei gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen. Zum einen sind dies säurebasierte Flüssigkeiten, die direkt auf die Warze bzw. Fußwarze aufgetragen werden. Zum anderen können Warzen ausgebrannt oder durch Laser- oder Kältebehandlung entfernt werden. Dies kann durch medizinisches Fachpersonal erfolgen oder Sie können zu Hause selbst eine Kältebehandlung (Wartner® Vereisungsmethode) durchführen. Der Wartner® Stift gegen Warzen ist eine wirksame und einfach anzuwendende Alternative für zu Hause und enthält eine hochkonzentrierte Lösung zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen.

## WARNHINWEISE & VORSICHTSMASSNAHMEN

Trichloressigsäure ist eine stark ätzende Säure.

- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.
- Die Anwendung bei Diabetespatienten und Personen mit Durchblutungsstörungen wird nicht empfohlen.
- Ausschließlich für das Entfernen von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen verwenden.
- Ein Stift darf nur für eine Person verwendet werden.
- Nur zur äußeren Anwendung auf Händen und Fußsohlen. Nicht auf anderen Körperteilen anwenden.
- Nicht auf offenen Wunden oder gesunder oder gereizter Haut verwenden.
- Nicht anwenden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze handelt.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgen Sie den Stift in folgenden Fällen:

- Die Verpackung oder das Produkt ist beschädigt.
- Die Spitze des Stifts bricht beim erstmaligen Drehen der Verschlusskappe nicht ab.
- Beim Drücken des blauen Knopfs ist kein deutliches Klicken zu hören.

### Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hautarzt, wenn:

- Das Produkt in Kombination mit anderen Behandlungen verwendet wird.
- Nebenwirkungen oder andere allergische Reaktionen auftreten.
- Die Symptome sich nach einem Behandlungszeitraum von 6 Wochen nicht verbessert haben.
- Sie schwanger sind oder stillen.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß internationalen und nationalen Vorschriften für Abfallentsorgung.



**Bewahren Sie diese Gebrauchsinformation auf. Sie enthält wichtige Informationen.**



**Öffnen Sie nicht die Kappe, bevor Sie sie gedreht haben** (Siehe Anwendung, Punkt 1)



**Vermeiden Sie den Kontakt** der TCA-Lösung mit gesunder Haut und den Augen.

Bei Kontakt die Lösung sofort mit einem trockenen Wattestäbchen abwischen, um das Abschälen gesunder Haut zu vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie diese für 15 Minuten und holen Sie sofort ärztliche Hilfe ein.



1. **Bei Erstanwendung** und vor dem Abnehmen der Kappe: Drehen Sie vor der Erstanwendung die blaue Kappe mindestens 3-mal um 360°, um die innere Versiegelung zu durchtrennen. Wenn Sie diesen Schritt nicht durchführen, wird der Stift nicht aktiviert und ist nicht funktionstüchtig.



2. **Vor jedem Gebrauch** klopfen Sie mit dem Stift (blaue Kappe zeigt nach unten) 3-mal auf eine flache, feste Oberfläche (z.B. auf einen Tisch), damit die Flüssigkeit in die vordere Spitze des Stifts fließen kann.



3. Bringen Sie die Noppe der blauen Kappe auf eine Linie mit der Noppe des weißen Stifts und ziehen Sie dann die Kappe ab. Beim Abziehen der Kappe wird etwas Kraft benötigt, da die Kappe kindersicher konzipiert ist.



4. Platzieren Sie die Spitze des Stifts senkrecht auf der Warze. Betätigen Sie jetzt 1-mal den blauen Knopf und lassen Sie die Spitze des Stifts für **10 Sekunden** auf der Warze. Eine Mikrodosierung (in der Größe eines Mohntropfs) der transparenten Warzenentfernungsflüssigkeit wird aus der Spitze des Stifts abgegeben. Bei größeren Warzen (> 6 mm) kann eine weitere Anwendung erforderlich sein.



5. Setzen Sie die blaue Kappe nach der Anwendung wieder auf den Stift und stellen Sie sicher, dass sich die blaue und weiße Noppe nicht auf einer Linie befinden (Kindersicherung).

Wiederholen Sie die Anwendung 1-mal pro Woche für maximal 6 Wochen, bis die Warze vollständig entfernt ist. Ein Stift reicht für die Behandlung von mindestens 3 Warzen. Für jede weitere Anwendung wiederholen Sie die Schritte 2-5. Achten Sie darauf, **den Stift** vor jeder Anwendung 3-mal auf eine flache, feste Unterlage **zu klopfen** (blaue Kappe nach unten), damit die Flüssigkeit in die vordere Spitze des Stifts fließen kann.

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, vor der Anwendung die betroffene Stelle für 5 Minuten in warmem Wasser zu baden. Trocknen Sie die betroffene Stelle gut ab, bevor Sie das Produkt anwenden.

## NEBENWIRKUNGEN

Im Laufe der Behandlung kann sich die Warze dunkel verfärben. Dies ist normal und Teil des Heilungsprozesses.

Es kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Dies ist normal und vorübergehend. Falls die Beschwerden in den darauffolgenden Tagen anhalten sollten, stoppen Sie die Behandlung und konsultieren Sie einen Arzt. Um Irritationen und Hyperpigmentierung (Braunfärbung der Haut) zu vermeiden, sollte die behandelte Stelle während und bis 30 Tage nach der Behandlung vor direktem Sonnenlicht und UV-Strahlen geschützt werden.

Nach erstmaligem Öffnen des Stifts innerhalb von 6 Wochen verbrauchen.

Für mehr Informationen: [www.wartner-warzen.de](http://www.wartner-warzen.de) oder [www.wartner-warzen.at](http://www.wartner-warzen.at)

Enthält 350 µL TCA-(Trichloressigsäure-) Lösung.




Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgien

Vertrieb DE: Perrigo Deutschland GmbH, Königstraße 26, DE-70173 Stuttgart

Vertrieb AT: Perrigo Österreich GmbH, Rennweg 17, AT-1030 Wien

Stand der Informationen: Februar 2022

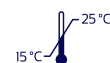

LF232IID