

**Gebrauchsinformation:**



## **Herpes Patches**

Medizinprodukt

### **Anwendungsgebiet:**

Zur Förderung der Heilung bei Lippenherpes.

### **Anwendung:**

Das Patch sollte auf gereinigter und trockener Haut aufgebracht werden.

Nicht in Kombination mit Cremes oder Salben oder auf feuchter Haut anwenden, da dies die Klebekraft des Patches beeinträchtigen kann.

Lösen Sie ein einzelnes Patch mit Träger von der Karte. Entfernen Sie den größeren Teil des Trägers.

Verwenden Sie den Spiegel in der Box (vor erster Anwendung bitte Schutzfolie vom Spiegel entfernen), um das Patch korrekt zu platzieren.

Positionieren Sie den halb freigelegten Teil des Patches direkt über der von Lippenherpes betroffenen Hautstelle. Ziehen Sie den Rest des Trägers vorsichtig ab, um das Patch komplett zu platzieren.

Drücken Sie das Patch mit einem Finger leicht an, um eine gute Haftung der gesamten Fläche des Patches zu gewährleisten.

### **Zusammensetzung:**

Hydrocolloid Adhesive Formulation H014, PU-Film

### **Hinweise:**

Das Patch kann durch die Aufnahme von Flüssigkeit seine Farbe leicht verändern.

Das Patch kann bis zu 5 Tage auf der Lippe verbleiben.

Wenn sich das Patch zu lösen beginnt oder Sie es gerne entfernen möchten, fassen Sie das Patch an einer Seite an und ziehen Sie es vorsichtig, so dass es sich dehnt und langsam von der Haut ablöst.

Sollten Zeichen einer Infektion auftreten (z. B. Eiter, starker Geruch), unterbrechen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

## Warnhinweise:

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Nicht anwenden, falls Sie allergisch gegen das Patch oder einen seiner Bestandteile sind.

Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.

Nicht auf offenen oder entzündeten Wunden anwenden.

Im Zweifel Rücksprache mit einem Arzt halten.

**Inhalt:** 12 Patches (12 mm)



Bitte Gebrauchsinformation beachten!



Nur einmal verwenden!



Bitte bewahren Sie **Herpes Patches** zwischen 5°C und 30°C auf.



Vor Sonnenlicht geschützt und trocken aufbewahren



Medizinprodukt



Chargennummer und Verfalldatum sind auf dem Sachet und der Box-Oberseite aufgeprägt.



053535



**Hersteller:** Aso LLC, 300 Sarasota Center Blvd., 34240 Sarasota FL, USA



Aso Europe BV  
Nijverheidstraat 48  
6681 LN Bommel, NL



Shop-Apotheke B.V., Erik de Rodeweg 11/13, 5975 WD Sevenum, NL

Stand der Information: 12.2021  
071\_REV06 G03 REV202211

**CE** 2797

211062212008