



back  
170mm

#### Použitie/Indikácie:

Vaginálny systém je charakterizovaný komplexom rôznych mikroorganizmov, ktoré vytvárajú prirodzenú fyziologickú ochranu. Bakteriálna flóra na povrchu vaginálnej sliznice je tvorená prevažne baktériami mliečného kvasenia. Kombinácia tyndalizovaných baktérií mliečného kvasenia, laktobacilov (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus casei*) pomáha stimulovať prirodzenú imunitnú obrannosť, zabraňuje príľnutiu patogénov na sliznicu, udržiava rovnováhu vaginálnej flóry v období, keď bola poškodená alebo zničená v dôsledku tehotenstva a chorobami, ktoré postihujú pošvu (vaginálny výtok, zápal, infekcia).

#### Návod na použitie/dávkovanie:

Zaveďte do pošvy jeden čapík raz denne, najlepšie večer pred spaním počas 10 dní po poslednom dni menštruačného cyklu alebo podľa odporúčania lekára.

- Umyte si dôkladne intímne partie.
- Umyte si dôkladne ruky a vyberte čapík z blistra.
- Opatrne vložte čapík do pošvy čo najhlbšie, najlepšie v polohe na chrbte.

#### Kontraindikácia:

Známa precitlivosť na ktorúkoľvek zložku zdravotníckej pomôcky.

#### Upozornenia:

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Neprehŕtajte. Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený. Nepoužívajte pomôcku po dátume expirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum expirácie sa vzťahuje k nepoškodenému a správne skladovanému produktu. Nepoužívajte v prípade vaginálnych lézií alebo poranení. Nepoužívajte v čase menštruácie. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku bez konzultácie s lekárom. V priebehu tehotenstva a dojčenia má byť pomôcka používaná len ak je to potrebné a len pod priamym dohľadom Vášho ošetrojúceho lekára. Jednorazové opätovné použitie môže ovplyvniť bezpečnosť pomôcky.

#### Uchovávanie:

Uchovávať pri teplote 2 – 25 °C. Uchovávať balenie starostlivo uzavreté a na suchom mieste, chrániť pred svetlom a zdrojmi tepla.

Revízia textu: 02/2024

 **Velit Biopharma S.r.l.**, Piazza Cavour 3,  
20121 Miláno, Taliansko

#### Distribútor:

**HEATON k.s.**, Na Pankráci 332/14,  
140 00 Praha 4, Česká republika



Asocierea de tulpini tindalizate de *Lactobacillus* (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus casei*) ajută la stimularea apărării imune naturale, la prevenirea aderării microbilor și menținerea echilibrului florei vaginale, atunci când aceasta a fost deteriorată sau distrusă în cursul sarcinii sau în caz de boli care afectează vaginul (secreții vaginale, inflamații, infecții).

#### Instrucțiuni de utilizare/Doze:

Introduceți un supozitor în vagin o dată pe zi, de preferință seara, înainte de culcare, timp de 10 zile după ultima zi a ciclului menstrual sau conform recomandărilor medicului.

- Spălați bine zonele intime (de preferat prin spălături vaginale, atât extern cât și intern).
- Deschideți ambalajul și, după ce v-ați spălat bine pe mâini, extrageți un singur supozitor din blister.
- Introduceți ușor supozitorul în vagin, încercând să ajungeți cât mai în profunzime - de preferat, stați în poziție culcată.

#### Reacții adverse:

Hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente.

#### Atenționări:

A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor. A nu se înghiți. A nu se utiliza dacă ambalajul a fost deschis anterior sau dacă prezintă semne de deteriorare.

Nu utilizați dispozitivul după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la dispozitivul nedeteriorat și păstrat corespunzător.

Nu utilizați dispozitivul în caz de leziuni sau rani vaginale.

Nu utilizați în timpul menstruației.

Nu depășiți doza zilnică recomandată fără sfatul medicului.

În timpul sarcinii și alăptării, utilizarea trebuie limitată numai dacă este strict necesar și sub supravegherea directă a medicului dumneavoastră.

Pentru o singură utilizare - reutilizarea poate afecta siguranța dispozitivului.

#### Păstrare:

A se păstra la temperatura de 2 - 25 °C, în ambalajul original. A se ține ambalajul închis bine, într-un loc uscat, protejat de surse de lumină și căldură.

Revizuirea textului: 02/2024

 **Velit Biopharma S.r.l.**, Piazza Cavour 3,  
20121 Miláno, Italia

#### Distribuitor:

**HEATON k.s.**, Na Pankráci 332/14,  
140 00 Praha 4, Republica Cehă



#### (RO) GYNELLA® Flora 10 supozitoare vaginale

GYNELLA® Flora este un dispozitiv medical care conține bacterii lactice tindalizate non-viabile – tulpini de *Lactobacillus* (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus casei*). Acesta susține apărarea la nivelul microflorei vaginale în cazul în care aceasta este redusă din cauza factorilor externi (cum ar fi utilizarea de antibiotice, utilizarea frecventă a tampoanelor, stil de viață, activități fizice, contracepție, igienă intimă necorespunzătoare, sarcină, naștere etc.).

#### Utilizare/Indicație:

Dispozitivul vaginal conține diverse complexe de microorganisme care acționează fiziologic, ca o protecție naturală. Flora bacteriană din mucoasa vaginală este formată în principal din bacterii lactice.



material packaging code

195mm