

tetesept:

Meerwasser Nasendusche Bei Schnupfen und Pollenallergie

Gebrauchsinformation,
aufmerksam lesen!

Medizinprodukt

Produktbeschreibung
Nasendusche:

Die Nasendusche besteht aus einer Flasche für die Spülflüssigkeit mit Knopf für den Lufteinlass am Boden, sowie einem Spülkopf, welcher mit verschiedenen Aufsätzen an verschiedene Anwendergruppen (Kinder, Erwachsene) angepasst werden kann.

Zusammensetzung tetesept
Nasenspülsalz:

BIOMARIS Spezial Meersalz,
Natriumchlorid, Magnesium-
carbonat

Darreichungsform und Inhalt:

1 Nasendusche, 2 Aufsatz-
köpfe, 4 Portionsbeutel
Nasenspülsalz

Zweckbestimmung:

Die wiederverwendbare
Nasendusche ist zur gründ-
lichen und regelmäßigen
Spülung der Nasenhaupt-
höhle und damit intensiven
Reinigung und Befeuchtung
der Nase bestimmt.

Gegenanzeigen:

Die Nase darf nicht gespült
werden:

- bei starkem Nasenbluten
- wenn eine Nasenhöhle ver-
stopft ist oder eine Beein-
trächtigung der Ohren oder
des inneren Gehörganges
vorliegt
- wenn durch Verletzungen
am Nasendach und an den
Nebenhöhlenwänden
direkte Verbindungen zu
den Flüssigkeitsräumen
des Gehirns bestehen.

**Dosierungsanleitung, Art
und Dauer der Anwendung:**
tetesept Meerwasser Nasen-
spülsalz ist für die Anwendung
mit handelsüblichen Nasen-
duschen unter Verwendung
von 250 ml Wasser geeignet.
Es ist speziell auf die Verwen-
dung mit der tetesept Meer-
wasser Nasendusche (Füll-
höhe = 250 ml) abgestimmt.

tetesept Meerwasser Nasen-
spülsalz eignet sich zur
Herstellung von zwei unter-
schiedlich dosierten Salz-
lösungen:

1. Isotonische Salzlösung = 1 Portionsbeutel

Der Gehalt dieser Salzlösung
entspricht exakt der Salz-
konzentration des Blutes im
menschlichen Körper und ist
daher besonders sanft.

Diese Lösung eignet sich
daher besonders gut zur vor-
beugenden und regelmäßi-
gen Anwendung. Isotonische
Nasenspülungen können bis
zu 3 × täglich mit je 250 ml
Lösung durchgeführt werden.

Eine intensive Reinigung und
Befeuchtung der Nase kann
bereits mit der 1 × täglichen
Anwendung erzielt werden.

Im Rahmen langfristiger Spül-
therapien (mehrere Monate
und Jahre) haben sich auch
regelmäßige Spülbehandlun-
gen alle 2–3 Tage bewährt.

2. Hypertone Salzlösung = 2 Portionsbeutel

Der erhöhte Salzgehalt die-
ser Lösung bewirkt ein
natürliches Abschwellen der
Nasenschleimhäute, da die-
sen durch den sogenannten
Osmose-Effekt auf natür-
liche Weise überschüssige
Flüssigkeit entzogen wird.

Diese Lösung eignet sich
daher besonders gut zur
Anwendung bei akuten
Beschwerden wie einer ver-
stopften Nase und Schnupfen.


Hypertone Nasenspülungen
können bis zu 2 × täglich
mit je 250 ml Lösung durch-
geführt werden.

Wenn Sie sich nach 4 bis 5
Tagen nicht besser oder gar
schlechter fühlen, wenden
Sie sich an Ihren Arzt.

Gebrauch der Nasendusche:


Vor dem ersten Gebrauch
alle Kunststoffteile gründlich
reinigen und den Dichtungs-
ring in den Schraubaufsatz
einlegen.

Stellen Sie sicher, dass der
Druckknopf am Boden der
Flasche in geschlossener
Position ist, um einen Austritt
von Flüssigkeit zu vermeiden.

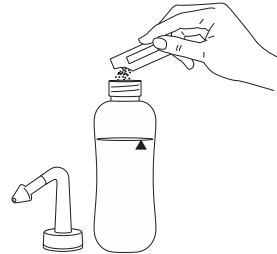

Die Flasche bis zur Markie-
rungslinie auf der Flaschen-
seite mit lauwarmem
Wasser (37°C) befüllen und
1–2 Portionsbeutel tetesept
Meerwasser Nasenspülsalz
hinzugeben.

Den Spülkopf auf die Nasen-
dusche drehen und verschlie-
ßen. Jetzt die Nasendusche
so lange sanft schwenken,
bis sich das Salz vollständig
aufgelöst hat.

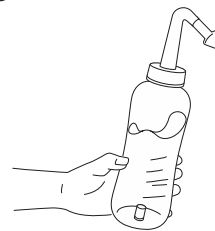

Den Kopf des Anwenders
über ein Waschbecken vor-
beugen und den Mund weit
öffnen. Der Kopf kann leicht
seitlich schräg gehalten wer-
den, um die Anwendung der
Nasendusche zu erleichtern.



In dieser Position die Nasen-
dusche mit dem Spülkopf
nach unten und dem Druck-
knopf nach oben vorsichtig
an eine Nasenhöhle anlegen,
so dass dieses Nasenloch
verschlossen ist. Hierbei
während der Anwendung nur
durch den Mund atmen.

Nun den Druckknopf an der
Flasche betätigen, um die

Spülflüssigkeit in die Nase
gelangen zu lassen.

Die Spülflüssigkeit tritt durch
das zweite Nasenloch wieder
aus. Ein erneutes Betätigen
des Druckknopfes beendet
oder unterbricht den Spül-
vorgang und verschließt die
Flasche.

Nach der Spülung:

Wenn Sie unmittelbar nach
der Spülbehandlung die
Nase putzen möchten, ach-
ten Sie darauf, dass Sie nur
ein Nasenloch verschließen,
damit Sie den Druck in der
Nasenhöhle nicht erhöhen.
Der auf diese Weise erzeugte
Druck kann Lösung und
Sekret in die Verbindungs-
gänge von der Nase zu den
Ohren oder den Nebenhöhlen
drücken. In der Regel läuft
die Flüssigkeit in kürzester
Zeit von selbst zurück.

**Was tun, wenn die Spülflüs-
sigkeit in den Rachen läuft?**

Sollten geringe Mengen der
Spülflüssigkeit in den Rachen
gelangen, können diese aus-
gespuckt oder geschluckt
werden.

**Was tun, wenn Spülflüssig-
keit noch lange nach der
Behandlung aus der Nase
läuft?**

Dieses Problem kann bei
Anwendern auftreten, die
über eine Nase mit vielen
Nischen verfügen. Diese soll-
ten nach jeder Spülbehand-
lung den Kopf über dem
Waschbecken mehrmals zu
allen Seiten drehen, damit
die Spülflüssigkeit gänzlich
aus der Nase läuft.

Reinigung der Nasendusche:

Vor und nach jeder Benut-
zung die Nasendusche
gründlich mit heißem Wasser
auswaschen und ausspülen,
den Spülkopf abschrauben
und die Flasche gut trocknen
lassen.

Während der Trocknung die
Nasendusche nicht ver-
schließen.

Ungenügende Reinigung
oder Trocknung kann zu Ver-
keimungen führen, die
Krankheiten auslösen oder
verschlimmern können.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Kein pures Wasser oder Speisesalz anstelle der Spüllösung verwenden.

Die Nasendusche während der Anwendung nicht zusammendrücken, um den Spüldruck zu erhöhen.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz enthält keine Konservierungsstoffe. Spüllösungen sind daher unmittelbar nach Herstellung zu verbrauchen und können nicht in der Nasendusche aufbewahrt werden. Eine Verkeimung der Lösung birgt ein mögliches Infektionsrisiko.

Kinder unter 12 Jahren sollten die Nasendusche nur unter Aufsicht verwenden.

Die Nasendusche ist ein Produkt der persönlichen Pflege. Den Spülkopf nicht mit mehreren Anwendern gemeinsam nutzen.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann es zu leichten Reizerscheinungen wie Kribbeln und Brennen in der Nase kommen, vor allem bei der Anwendung von hypertonen Spüllösungen.

Wechselwirkungen:

Derzeit sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Nasenspülungen mit der tetesept Meerwasser Nasendusche und dem isotonen tetesept Nasenspülsalz sind für alle Patientengruppen, inkl. schwangerer oder stillender Frauen, durchführbar.

Überdosierung und Anwendungsfehler:

1 Portionsbeutel tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ergibt 250 ml isotone Spüllösung. Wird die Nasendusche nicht bis zur 250 ml Markierung befüllt, entstehen hypertone Spüllösungen, die die Nasenschleimhaut irritieren und zu leichten Rötungen führen können.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Das Verfallsdatum dieses Medizinprodukts ist auf dem Umkarton und den Portionsbeuteln aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum! Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, die tetesept Meerwasser Nasendusche bei regelmäßiger Anwendung nach 12 Monaten und die Aufsatzköpfe nach 6 Monaten auszutauschen.

Nicht über 25°C, trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Die Nasendusche und das Zubehör können nach Ablauf des Verwendungszeitraumes entsprechend den gesetzlichen Regelungen über den Hausmüll entsorgt werden.

Hinweis:

Alle in Verbindung mit der Nasendusche auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind der Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH und der zuständigen Behörde zu melden.

Hersteller:

Nasenspülsalz

 MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Nasendusche und Aufsatzköpfe

 Transatlantic Handelsge-
sellschaft Stolpe & Co. mbH
Siemensstraße 21–23
D-61267 Neu-Anspach

Vertrieb:

tetesept Pharma GmbH
D-60048 Frankfurt



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Stand der
Gebrauchsanweisung:
2021-10.

MN 67491



Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:

-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung
-  Katalognummer
-  Hersteller
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  25°C Temperaturbegrenzung Lagerung
-  Trocken aufbewahren

Hinweis:

Für den Fall, dass das Aufstecken und Absetzen des Aufsatzkopfes etwas schwergängig ist, kann eine gleichzeitige Drehbewegung helfen.



Alle Materialien sind frei von bedenklichen Weichmachern (BPA), so dass die Verbindungen der Teile etwas fester sind. Damit wird die einwandfreie Funktionalität der Nasendusche über die Anwendungsdauer gewährleistet.

tetesept Gesundheits- tipp:

tetesept Meerwasser Nasendusche

Die Nase wird täglich durch Umwelteinflüsse wie Staub und Schmutz, Allergene, Erkältungsviren und andere Krankheitserreger beansprucht. Für die Gesunderhaltung der Nasenschleimhaut ist eine schonende und intensive Tiefenreinigung und Befeuchtung der Nasenhöhle wichtig.

tetesept Meerwasser Nasendusche

ist ein Familienset mit austauschbaren Aufsatzköpfen in zwei verschiedenen Größen und Spülstärken. Sie bieten

die individuelle Auswahl zwischen einem sanften und einem intensiven Spülstrahl. Zudem passt die Nasendusche optimal für kleine und größere Nasen. Die Nasendusche ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet. Sie eignet sich auch für Schwangere und Stillende.



tetesept Meerwasser Nasenspülsalz

enthält 100% naturreines BIOMARIS Meersalz, das sich durch einen Multimineralienkomplex mit besonders hohem Anteil an wertvollen Mineralien Magnesium und Calcium auszeichnet.



Magnesium ist dabei wichtig für die abschwellende und regenerierende Wirkung, auch bei Allergien. Calcium unterstützt den effektiven Abtransport von Nasensekret.

Damit eignet sich tetesept Meerwasser Nasenspülsalz als schonendes, natürliches Mittel bei Schnupfen inklusive Nasennebenhöhlenbeschwerden, Heuschnupfen, zur Nasenschleimhautpflege und zur Vorbeugung von Infekten.

tetesept Meerwasser Nasenspülsalz ist praktisch vorportioniert in Sachets für eine 250 ml Lösung. Es ist besonders schnell und gut löslich.

Es ist auch als Nachfüllpackung mit 20 Portionsbeuteln verfügbar.

tetesept Gesundheits-Tipp:

Was Ihrer Nase außerdem noch gut tut:

Pflegen Sie Ihre Nase zusätzlich mit tetesept Nasen Heilsalbe mit Dexpanthenol. Sie heilt, pflegt und schützt die trockene und wundete Haut in und an der Nase und unterstützt wirksam deren Heilung. Sie befeuchtet langanhaltend und ist auch vorbeugend wirksam.