

Gebrauchsanweisung

OCUsalin® night 5 g Tube

OCUsalin® night ist eine hypertone Augensalbe mit 4,5 % Natriumchlorid und 0,4 % Natriumhyaluronat in einer 5 g Tube. Dieses Medizinprodukt dient zur vorübergehenden Linderung der Symptome eines Hornhautödems.

WAS IST OCUsalin® night?

OCUsalin® night Tube enthält 5 g sterile, hypertone Augensalbe. Das Präparat beinhaltet Natriumchlorid als osmotisch aktive Substanz, Natriumhyaluronat, Vaselineöl, Vaseline, Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wollwachsalkohol, Wasser und Hydroxymethylglycinat. Die zähflüssige Beschaffenheit von OCUsalin® night ermöglicht ein längeres Anhaften an der Augenoberfläche, wo sich die schützende und befeuchtende Wirkung auch nachts entfalten kann.

WANN IST OCUsalin® night ANZUWENDEN?

OCUsalin® night ist eine sterile, hypertone Augensalbe, die zur vorübergehenden Linderung der Symptome eines Hornhautödems, zum Beispiel Veränderung des Sehvermögens und Schmerzen, angezeigt ist, auch nachts. Der hohe Gehalt an Natriumchlorid bewirkt, dass die Osmolarität von OCUsalin® night höher ist als die von Tränenflüssigkeit. Dieser Konzentrationsunterschied ist für die ödematöse Flüssigkeitsresorption notwendig. Die Anwendung von OCUsalin® night führt zu einer erhöhten Salzkonzentration im Tränenfilm, was zur Folge hat, dass Wasser aus den Hornhautschichten an die Oberfläche geleitet wird. Das Natriumhyaluronat in OCUsalin® night bildet eine Schutzschicht auf der Hornhautoberfläche, die das Auge befeuchtet und schützt. Natriumhyaluronat macht die Anwendung einer hypertonen Salbe angenehmer, dank seiner mechanisch schützenden und die Gleitfähigkeit fördernden Eigenschaften.


WIE IST OCUsalin® night ANZUWENDEN?

- Waschen Sie sich die Hände gründlich, bevor Sie OCUsalin® night anwenden.
- Nach dem Öffnen von OCUsalin® night, verwenden Sie nicht den ersten Tropfen, denn dieser könnte zu wässrig sein, bevor die Salbe aus der Tube kommt.
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten und ziehen Sie das Unterlid Ihres Auges nach unten, um eine kleine Tasche zu bilden.
- Halten Sie die Tube senkrecht über Ihr Auge.
- Drücken Sie die Tube sanft, um eine kleine Menge von OCUsalin® night in das zu behandelnde Auge einzuführen.
- Wenden Sie eine kleine Menge der Salbe am besten vor dem Schlafengehen an.
- Falls Sie eine weitere Gabe tagsüber benötigen, verwenden Sie eine kleine Menge der Salbe alle drei oder vier Stunden, oder wie vom Arzt/von der Ärztin verordnet.
- Stellen Sie sicher, dass die Tubenspitze weder Ihr Auge noch Ihre Finger berührt.
- Nach Gebrauch ordnungsgemäß mit der Verschlusskappe verschließen.


WARNHINWEISE


- Wenden Sie OCUsalin® night nicht an, wenn eine Überempfindlichkeit bekannt ist oder Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.
- Falls eine Augenirritation auftritt, beenden Sie die Anwendung von OCUsalin® night und fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat.
- Nach der Anwendung kann es sein, dass Sie ein Fremdkörpergefühl im Auge haben, was aber durch mehrmaliges Blinzeln behoben wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.


- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Innerhalb von 8 Wochen nach Anbruch verwenden.
- Fern von direkter Hitze, an einem kühlen, trockenen Ort mit einer Temperatur von 9 bis 25°C lagern.
- Nicht schlucken.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Teilen Sie OCUsalin® night mit niemanden.
- Vorübergehendes verschwommenes Sehen kann wegen der zähflüssigen Beschaffenheit und längerer Verweildauer von OCUsalin® night am Auge auftreten. Stellen Sie sicher, dass Sie wieder klar sehen, bevor Sie ein Kraftfahrzeug führen, Werkzeuge benutzen oder Maschinen bedienen.
- Entfernen Sie Kontaktlinsen, bevor Sie die Salbe anwenden, da sonst die Oberfläche der Kontaktlinsen beeinträchtigt werden könnte.
- Falls Sie auch andere Augentropfen oder -salben benutzen, lassen Sie etwa fünf-zehn Minuten zwischen jeder Anwendung verstreichen. Es wird empfohlen, OCUsalin® night als letztes anzuwenden.
- Falls Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, bevor Sie OCUsalin® night anwenden.
- Normalerweise ist das Produkt für eine kontinuierliche Anwendung über maximal sieben aufeinander folgende Tage vorgesehen; bitten Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin um Rat, falls sich Ihre Symptome nicht verbessern.
- Verwenden Sie OCUsalin® night nicht bei Augenläsionen.

LOT Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Etikett und der Faltschachtel eingeprägt.

STERILE R Steril durch Bestrahlung.

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.

 Lagerungstemperatur.

 Nicht verwenden bei beschädigter Flasche oder Siegelring.

Hersteller:
NTC S.r.l.
Via Luigi Razza 3
20124 Milano
Italy

Vertrieb in Deutschland:
Pharma Stulln GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Germany



CE 0426

STAND DER INFORMATION: 02/2019

pharma STULLN