

excilor®

WARZEN DUO POWER

DE

LESEN SIE BITTE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCH. FÜR EINE ERFOLGREICHE BEHANDLUNG MÜSSEN SIE JEDEN EINZELNEN SCHRITT BEFOLGEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF, VIELLEICHT MÜSSEN SIE SIE NOCH EINMAL LESEN. WENN SIE FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HAUSARZT ODER APOTHEKER.

Wie funktioniert Excilor® Warzen DUO POWER?

Excilor® Warzen DUO POWER enthält zwei Stifte: einen Kältebehandlungsstift ❄️ und einen Säurebehandlungsstift 💧. Der Kältebehandlungsstift basiert auf der Gefriermethode, die üblicherweise von Allgemeinmedizinern angewendet wird und die Warzen an Ort und Stelle vereist. Der Kernbereich der Warze wird dabei gefroren. Der Säurebehandlungsstift enthält eine konzentrierte ätzende Gel mit Trichloressigsäure, welche die Abschälung der Warzen bewirkt. Während der Behandlung wird die Haut dunkler und beginnt sich zu schälen; es bildet sich ein Schorf. Die Abschälung ist ein natürlicher Prozess und zieht sich über 1 bis 2 Wochen nach der Behandlung hin. Die erneuerte Haut erscheint glatter, leicht rosa und nimmt innerhalb der folgenden Wochen ihre natürliche Farbe wieder an.

Was ist eine Warze?

Gewöhnliche Warzen (*Verruca vulgaris*) und Fußwarzen (*Verruca plantaris*) erscheinen auf der Haut als kleine, raue „blumenkohlartige“ Wucherungen, die durch eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) verursacht werden. Gewöhnliche Warzen treten meist an Händen, Fingern oder Zehen auf. Fußwarzen wachsen hauptsächlich an den Fußsohlen oder Fersen und sind in der Regel flacher, härter und oft schmerzhaft beim Gehen oder Stehen. Beide sind hochgradig ansteckend und betreffen drei von vier Menschen im Laufe ihres Lebens. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob es sich bei der Hauterkrankung tatsächlich nur um einen Warzenbefall (*Verruca*) handelt, fragen Sie vor der Anwendung von Excilor® Warzen DUO POWER Ihren Apotheker oder Hausarzt.


Was sollten Sie vor der Anwendung von Excilor® Warzen DUO POWER wissen?

⚠️ Nicht zu verwenden in folgenden Fällen:

- Bei Kindern unter 4 Jahren.
- An keinen anderen Körperstellen als an Händen und Füßen.
- Auf der gesunden Haut, die die Warze umgibt.
- Auf blutender, gereizter, entzündeter Haut oder Haut mit Anzeichen einer Entzündung wie Juckreiz oder Schwellungen.
- An offenen Wunden.
- Auf Hautanhängseln, Muttermalen, dunklen Hautflecken, Sommersprossen, Wasserwarzen (*Mollusca contagiosa*), seborrhoischer Keratose (*Verruca seborrheica*) oder abgelöster Haut.
- Auf flüssigkeitsgefüllten Hautblasen ("Molluscum contagiosum", auch Wasserwarzen genannt) oder anderen Bläschen oder Blasen.
- Bei Muttermalen, neuen und unregelmäßigen Wucherungen mit Durchblutungsgefäßen oder allem, was auf Hautkrebs (Melanom) hindeuten könnte.
- Bei Warzen, die größer als 5 mm sind, sollten Sie Ihren Hausarzt aufsuchen.
- Wenn das Paket beschädigt ist.

Seien Sie besonders vorsichtig:

Wenn mehrere Warzen nahe beieinander liegen (innerhalb von 1 cm); warten Sie dann, bis sich die Haut normalisiert hat, bevor Sie eine weitere Warze behandeln (das kann bis zu 6 Wochen dauern).

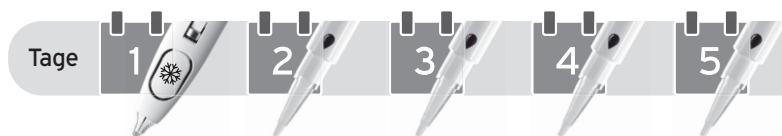

Halten Sie den Kältebehandlungsstift und den Säurebehandlungsstift nicht in die Nähe Ihres Gesichts. Verwenden Sie dieses Produkt nicht gleichzeitig mit anderen Warzenbehandlungen.

Die beiden Stifte, die in dieser Schachtel beiliegen, können entsprechend der Beschreibung verwendet werden, da ihre Verwendung klinisch getestet wurde.

Der Kältebehandlungsstift enthält einen unter Druck stehenden Behälter, der bei Erwärmung platzen kann. Halten Sie ihn fern von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, glühendem Material und anderen Zündquellen.

Setzen Sie den Stift keinen Temperaturen über 50°C aus.

Von direktem Sonnenlicht fernhalten.

Nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen.

Auch nach dem Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen - der Behälter steht unter hohem Druck und kann nicht geöffnet werden.

Rauchen Sie nicht und halten Sie keine brennenden Zigaretten in der Nähe, da das Produkt hochentzündlich ist.

Atmen Sie das Gefriermittel nicht ein.

Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Narbenbildung, Verbrennungen von gesundem Gewebe, an den Nerven oder Erblindung führen.

Halten Sie die Stifte nicht in der Nähe von Kleidung, Schmuck, Stoffen oder Möbeln, da diese dadurch beschädigt werden können.

Lassen Sie sich in folgenden Fällen erst von Ihrem Hausarzt oder Apotheker beraten:

Vor der Verwendung während einer Schwangerschaft oder Stillzeit, oder wenn Sie Diabetiker sind, eine schwache Durchblutung oder Hautkrankheiten haben oder wenn Sie Blutverdünnungsmittel einnehmen.

Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie wirklich nur eine Warze haben oder nicht.

Wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

Wenn Sie Reizungen, Rötungen oder Schmerzen verspüren, brechen Sie die Behandlung ab.

Wenn die Warze auch nach 3 Behandlungswiederholungen noch nicht verschwunden ist.

Wenn Sie eine Warze entfernen möchten, die größer als 5 mm ist.

Wie wendet man Excilor® Warzen DUO POWER an?

VOR DER BEHANDLUNG

Für eine erfolgreiche Behandlung müssen Sie jeden einzelnen Schritt in dieser Gebrauchsanweisung befolgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu brennenden Wunden oder Narben führen.

Beginnen Sie mit der Behandlung einer weiteren Warze erst, wenn keine Nebenwirkungen aufgetreten sind (in der Regel innerhalb von 5 Tagen).

Wenn mehrere Warzen nahe beieinander liegen (innerhalb von 1 cm), warten Sie mit der Behandlung einer weiteren Warze, bis sich die Haut normalisiert hat (dies kann bis zu 6 Wochen dauern).

Bei der Behandlung einer Warze, die von Hornhaut bedeckt ist, ist es ratsam, den Fuß zunächst 5 Minuten lang in lauwarmem Wasser einzuweichen und die Hornhaut vor der Behandlung vorsichtig mit einer Einwegfeile abzureiben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Behandlung z. B. an der Fußsohle aufzutragen, bitten Sie um Hilfe.

❄️ Tragen Sie das Kältebehandlungsmittel nur auf die Warze auf. Bei Anwendung auf gesunder Haut in der Umgebung der Warze kann ein Stechen, leichtes Brennen oder ein schmerzhaftes Gefühl an der behandelten Stelle auftreten und dies kann zu Hautschädigungen führen. Wenn das Stechen, Brennen oder die schmerzhaften Empfindungen bis zur nächsten Anwendung anhalten, sollte die Behandlung abgebrochen und ein Arzt aufgesucht werden. Die Haut kann sich vorübergehend weiß verfärben. Bei übermäßig heftiger

Aufbringung können die oberen Hautschichten geschädigt werden, was zu Narben und/oder Nervenschäden führen kann. In einigen Fällen kann eine große Blase entstehen, die schmerzhaft sein kann. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt und brechen Sie die Behandlung ab.

💧 Das Gel im Säurebehandlungsstift ist ätzend.

Nur einen Tropfen auf die Warze auftragen.

Nicht auf die gesunde Haut auftragen. Bei Anwendung auf gesunder Haut mit reichlich Wasser abspülen.

Sollte das Gel versehentlich mit den Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommen, mit reichlich Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:

Tag 1: Wenden Sie die Kältebehandlung 1 Mal pro Tag an.

Tag 2, 3, 4, 5: Wenden Sie die Säurebehandlung 2 Mal pro Tag an.

Für Kinder von 4-12 Jahren:

Tag 1: Wenden Sie die Kältebehandlung 1 Mal pro Tag an.

Tag 2, 3, 4, 5: Wenden Sie die Säurebehandlung 1 Mal pro Tag an.

Nur Erwachsene sollten die Mittel bei Kindern aufbringen.

👤 Aus Hygienegründen sollten die Stifte nur von einer einzigen Person verwendet werden.

BEHANDLUNGSABFOLGE

TAG 1: BEGINN MIT DEM KÄLTEBEHANDLUNGSSTIFT ❄️



SCHRITT 1 Halten Sie den Stift nach unten. Drücken Sie 5 Mal fest auf die Logos der seitlichen Tasten. Der Metallschaum wird mit kalter Flüssigkeit gesättigt und es wird eine Kondensation sichtbar (frostiges Aussehen).




SCHRITT 2 Drücken Sie den Metallschaum maximal 20 Sekunden lang leicht auf die zu behandelnde Warze. Halten Sie den Metallschaum 40 Sekunden lang auf Fußwarzen an Stellen mit dickerer oder schwieliger Haut, wie z. B. dem Fußballen oder der Ferse.


Es kommt zu einem schmerzhaften und/oder juckenden und/oder stechenden Gefühl.

TAG 2: BEGINN MIT DEM SÄUREBEHANDLUNGSSTIFT 💧

Sie können eine Salbe wie Vaseline verwenden, um den umliegenden Bereich zu schützen, bevor Sie das Gel auftragen.

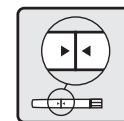


SCHRITT 3.1 Entfernen Sie die Kappe: Drehen Sie die Kappe, bis die Pfeile übereinander stehen.

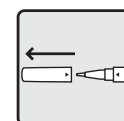


SCHRITT 3.2 Ziehen Sie die Kappe kräftig vom Stift ab.



SCHRITT 3.3 Halten Sie den Stift senkrecht mit der Spitze nach unten. Bei der ersten Verwendung den Stift vorbereiten und das Gel in die Spitze einlaufen lassen. Es kann bis zu 8 volle Umdrehungen im Uhrzeigersinn erfordern, um den ersten Tropfen Gel zu verteilen (dadurch wird genügend Druck aufgebaut, um die luftdichte Versiegelung zu zerbrechen und das Gel in die Spitze laufen zu lassen).

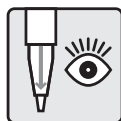


SCHRITT 3.4 Warten Sie, bis das Gel aus der Spitze austritt.

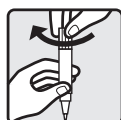


Bei jeder weiteren Verwendung: Drehen Sie den Drehknopf auf der Oberseite des Stifts langsam im Uhrzeigersinn.



Zwischen den einzelnen Klicks sollten jeweils 3-5 Sekunden liegen.

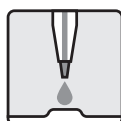

SCHRITT 3.5 Tragen Sie vorsichtig einen Tropfen (einen Klick) des Behandlungsgels genau auf die Warze auf.

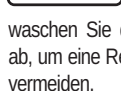

SCHRITT 3.6 Sollte das Gel versehentlich mit gesunder Haut in Berührung kommen,

waschen Sie den gesamten Bereich mit Wasser und Seife ab, um eine Reizung oder ein Brennen der gesunden Haut zu vermeiden.



SCHRITT 3.7 Lassen Sie das Gel 10-15 Minuten lang trocknen, bevor Sie gegebenenfalls Socken, Schuhe oder Handschuhe wieder anziehen.

SCHRITT 3.8 Wischen Sie die Spitze vorsichtig mit einem Papiertuch ab, um überschüssiges Gel zu entfernen. Setzen Sie den Stift fest auf und richten Sie die Pfeile aufeinander aus. Es können kleine Gelreste zurückbleiben. Beim Schließen und Öffnen ist Vorsicht geboten.

TAGE: 3, 4, 5 Wiederholung von SCHRITT 3

SCHRITT 4 Wenn die Warze nicht vollständig verschwindet, kann die Behandlung nach 7 Tagen gemäß der Behandlungsvorgabe oben wiederholt werden. Diese Abfolge darf bis zu 3 Mal wiederholt werden. Entsorgen Sie die Stifte nach der Behandlung gemäß den Entsorgungsvorschriften.

NACH DER BEHANDLUNG

Setzen Sie die behandelte Stelle nicht dem Sonnenlicht aus, bis sich die Haut wieder normalisiert hat. Dies kann 4 bis 6 Wochen dauern. Aufgrund von Sonneneinstrahlung kann es sonst zu einer Hyper- oder Hypopigmentierung der Haut kommen.

- Berühren Sie die behandelte Haut nicht und zupfen Sie nicht daran;
- Halten Sie die behandelte Stelle sauber;
- Schwimmen und Duschen sind erlaubt;
- Falls erforderlich, die Blase mit einem Pflaster schützen, aber nicht durchstechen.

Was sind die möglichen Nebenwirkungen?

Bei der Anwendung auf gesunder Haut kann ein Stechen, leichtes Brennen oder ein schmerzhaftes Gefühl an der behandelten Stelle auftreten; dies kann zu brennenden Wunden oder Narben führen. Sollten Sie eine solche Nebenwirkung feststellen, muss die Behandlung sofort abgebrochen werden. Waschen Sie die Haut mit viel Wasser und Seife, um Reizungen zu vermeiden. Komplikationen sind selten. Es ist äußerst selten, dass ein bleibender Fleck oder eine Narbe entsteht. Dies könnte in den meisten Fällen auf eine Anomalie wie eine Heilungsstörung oder eine Infektion zurückzuführen sein. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

In manchen Fällen kann eine große Blase entstehen, die schmerzhaft sein kann. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt und brechen Sie die Behandlung ab.

Was sind die Inhaltsstoffe?

Kältebehandlungsstift: (Gefriermittel:) 1,1-Difluorethan, Propan, Isopentan.

Säurebehandlungsstift: (Ätz-Gel:) Wasser, Trichlorressigsäure, Carbopol.

Wie ist Excilor® Warzen DUO POWER zu lagern?

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt muss bei Raumtemperatur (15-25°C) an einem trockenen und dunklen Ort gelagert werden. Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

Nicht nach dem auf den Stiften und dem Umkarton aufgedruckten Verfallsdatum verwenden. Nach dem ersten Öffnen hat das Produkt eine Haltbarkeit von 6 Monaten.

Wie meldet man Zwischenfälle/unerwünschte Ereignisse?

Melden Sie ein vermutetes Problem („Zwischenfall“) dem gesetzlichen Hersteller und bei info@excilor.com und/oder bei der örtlichen zuständigen Behörde.

Was ist der Inhalt des Pakets?

1 Kältebehandlungsstift mit 10 ml Gefriermittel.
1 Säurebehandlungsstift mit 1,5 g ätzendem Gel.
Gebrauchsanweisung.

Entsorgen Sie die Stifte nach der Behandlung. Rückstände sollten als Sondermüll entsorgt werden.

	Werkstoff	Abkürzung	Richtlinie für die Sammlung
Applikator Kryo	Polypropylen, Aluminium, Metall	C/PP 90	Prüfen Sie die Richtlinien Ihrer Kommune
Applikator Acid	Polypropylen	PP 5	
Äußere Schachtel	Nicht gewellte Pappe	PAP 21	
IFU	Papier	PAP 22	

Aluminiumdose noch mit Inhalt abgelassen: Als Sondermüll entsorgen

COOPER France
Place Lucien Auvert
77020 Melun - Cedex France

	Kältebehandlungsstift		Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren
	Säurebehandlungsstift		Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C)
	Warnung		Hersteller
	Ab 4 Jahren		Vertrieb durch
	Einzelnutzer - Mehrfachnutzung		Medizinisches Produkt
	Ätzend		Los
	Entflammbar		Verfallsdatum
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		Hände und Füße
	Übereinstimmung mit den Anforderungen des 75/324/EWG		Vor direktem Sonnenlicht schützen
	Gebrauchsanweisung beachten		
	CE-Kennzeichnung mit der vierstelligen Kennnummer der am Konformitätsbewertungsverfahren beteiligten benannten Stelle. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der geltenden europäischen Verordnung erfüllt.		

CE 2797

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt im April 2023 überarbeitet.

Medical Brands Innovations B.V.
Weesperstraat 114
1112 AP Diemen
Niederlande