

nuvino[®] HÄMORRHOIDEN- UND ANALFISSUREN-GEL

- Zur Behandlung äußerer Hämorrhoiden;
- Lindert Hämorrhoiden-Symptome wie Brennen, Juckreiz und Schmerzen, die durch Hämorrhoiden verursacht werden;
- Lindert lokale Reizungen, Analfissuren und äußere Beschwerden.

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits zuvor verwendet haben. Die Informationen in einer neuen Packung können aktualisiert worden sein, um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten zu entsprechen. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibungspflichtig. Trotzdem müssen Sie das nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, für den Fall, dass Sie sie noch einmal einsehen möchten.

Anwendung:

nuvino[®] Hämorrhoiden- & Analfissuren-Gel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung äußerer Hämorrhoiden sowie weiterer leichter anorektaler Beschwerden wie analem Juckreiz und Analfissuren. Dieses schützende Gel lindert Reizungen, Schwellungen, Blutungen, Juckreiz, Schmerzen und Brennen und verhindert den Kontakt der gereizten Haut mit reizenden Flüssigkeiten oder Stuhl aus dem Rektum.

Anwendung und Dosierung (nur für Erwachsene):

- Drücken Sie die Tube des nuvino[®]Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gels und geben Sie eine kleine Menge auf Ihren Finger.
- Tragen Sie das Gel mit dem Finger rund um den äußeren Bereich des Anus auf.
- Nach jeder Anwendung die Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife waschen.
- Tragen Sie das Gel zwei- bis viermal täglich auf den betroffenen Bereich auf, vorzugsweise nach dem Stuhlgang. Setzen Sie die Anwendung für 7–14 Tage fort.

Wirkungsweise:

nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel bildet eine schützende Schicht mit hervorragenden feuchtigkeitsspendenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Diese Schicht schützt den Anusbereich und trägt zur Wiederherstellung der strukturellen Unversehrtheit der Venen sowie des normalen Blutflusses in diesem Bereich bei. Das Gel wirkt entzündungshemmend und reduziert das Infektionsrisiko, aber nicht durch das Abtöten der Bakterien, sondern indem es verhindert, dass sie in die Haut eindringen. Es unterstützt die Rückbildung eines prolabierten Hämorrhoidalknotens, bevor er größer wird, und sorgt für eine glättende Wirkung bei hartem Stuhl.

Mögliche Nebenwirkung(en):

Reizung ist eine mögliche Nebenwirkung.

Anwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit:

Die Anwendung von nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit wird nicht

empfohlen, da keine ausreichenden Humanstudien zu den Wirkstoffen vorliegen.



Warnhinweise:

- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren;
- Bei Überempfindlichkeitsreaktionen die Anwendung des nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gels sofort beenden;
- Nicht nach dem auf der Verpackungsunterseite angegebenen Verfallsdatum verwenden.

Zusammensetzung:

Aqua, Glycerin, Betaine, Panthenol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Laureth-9, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Sodium Carboxymethyl Betaglukan, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Alcohol.

Inhalt: 40 ml

Art-Nr.: 003-NV-V1.0



Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.



Lagerungshinweise:

Bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C an einem trockenen, dunklen Ort in der Originalverpackung aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.



Verfallsdatum:

Das nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel darf nicht mehr angewendet werden, wenn das auf der Verpackungsunterseite (neben dem Sanduhr-Symbol) angegebene Verfallsdatum überschritten ist. Nach dem Öffnen ist das Produkt einen Monat haltbar.



Medizinprodukt:

Das nuvino[®] Hämorrhoiden- und Analfissuren-Gel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie 2007/47/EG.

Letztes Überarbeitungsdatum dieser Gebrauchsanweisung:
Januar 2025 • 003-NV-V1.0.



Hersteller:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL



Vertriebspartner:
R(h)ein Nutrition &
Health GmbH
Im Mediapark 5
50670 Köln, DE

CE 0481