

FR Cicadiane® MED est recommandée pour le traitement des lésions mineures, coupures, brûlures légères et abrasions (par ex. éraflures) ou ulcères et escarres.

Cicadiane® MED forme une barrière efficace et protectrice contre les agressions microbiennes et favorise la régénération naturelle des tissus pour une guérison plus rapide. L'acide hyaluronique favorise l'hydratation des tissus. Le Film Protect Technology forme un film hautement protecteur. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, le complexe breveté dioxyde de silicium - ions argent - chlorhexidine défend contre les agents microbiens extérieurs.

CONSEILS D'UTILISATION :

1. Nettoyer avec de la solution physiologique et sécher la zone touchée avant application.
2. Appliquer la quantité nécessaire pour couvrir la zone touchée.
3. Ne pas masser après application, laisser la crème sécher naturellement en formant un film protecteur continu.
4. Appliquer 1- 2 fois par jour.

MISES EN GARDE :

- Pour utilisation topique, ne pas avaler.
- Éviter le contact avec les yeux ; en cas de contact, rincer immédiatement à l'eau.
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de trois ans.
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
- Ne pas stériliser.
- Refermer soigneusement après usage.
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration figurant sur l'étiquette.
- Cesser le traitement en présence de réactions cutanées anormales, informer votre médecin et le fabricant.
- L'application ne nécessite pas l'intervention de personnel médical.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité établie aux composants. Aucun cas de phénomènes de surdosage ni d'interactions avec des médicaments ou substances pharmaceutiques n'est connu. La supervision d'un médecin est recommandée en cas d'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement.

COMPOSITION :

AQUA, CÉTÉARYL ETHYLHEXANOATE, MYRISTATE D'ISOPROPYLE, STEARETH-2, STEARETH-21, ALCOOL CÉTÉARYLIQUE, GLYCÉRINE, PANTHÉNOL, HUILE D'AMANDE DOUCE, BUTYROSPERMUM PARKII, SCX (DIOXYDE DE SILICIUM FONCTIONNALISÉ AVEC DES IONS D'ARGENT ET DE LA CHLORHEXIDINE), DIMÉTHICONE, JUS DE FEUILLE D'ALOE BARBADENSIS, HYALURONATE DE SODIUM, HUILE D'OLIVE, L-LYSINE, L-PROLINE, L-LEUCINE, GLYCINE, PHOSPHATIDYLCHOLINE HYDROGÉNÉE, TRIGLYCÉRIDES CAPRYLIQUES/CAPRIQUES, ÉTHANOL, SQUALANE, CERAMIDE NP.

Tube de 30 ml.
Rev. 2 - 19/10/2022

DE Cicadiane® MED wird entweder zur Behandlung kleinerer Verletzungen, Schnitten, leichteren Verbrennungen und Abschürfungen (z. B. Kratzer) oder Geschwüren und Dekubitus empfohlen.

Cicadiane® MED bildet eine effektive und schützende Barriere gegen mikrobielle Angriffe und fördert die natürlichen Prozesse der Geweberegeneration, so dass Wunden schneller heilen.

Hyaluronsäure fördert die Hydratation des Gewebes. Film Protect Technology verfügt über eine hohe filmbildende und schützende Wirkung.

Dank seiner antimikrobiellen Eigenschaften gewährleistet der patentierte SCX-Komplex (mit Silberionen und Chlorhexidin funktionalisiertes Siliziumdioxid) den Schutz gegen externe mikrobielle Erreger.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Reinigen Sie die betroffene Stelle mit einer physiologischen Lösung und trocknen Sie sie vor der Anwendung.
2. Tragen Sie die erforderliche Menge auf, um den betroffenen Hautbereich zu bedecken.
3. Nach dem Auftragen nicht massieren und die Creme auf natürliche Weise trocknen lassen, wobei sie einen durchgehenden Schutzfilm bildet.
4. 1- 2 Mal pro Tag auftragen.

WARNHINWEISE:

- Zur topischen Anwendung, nicht schlucken.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht sterilisieren.
- Die Verpackung nach Gebrauch vorsichtig verschließen.
- Nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.
- Bei abnormen Hautreaktionen die Behandlung abbrechen und Ihren Arzt und den Hersteller informieren.
- Für die Anwendung ist kein medizinisches Personal erforderlich.

KONTRAINDIKATIONEN:

Nachgewiesene Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen.

Es sind keine Fälle von Überdosierungserscheinungen oder Wechselwirkungen mit Arzneimitteln und medizinischen Substanzen bekannt.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird unter ärztlicher Aufsicht empfohlen.

Tube zu 30 ml.