

eye.care // cleaner

Reinigungslösung für alle Kontaktlinsen

40 ml

Reinigungsmittel Zum Reinigen. Für alle Kontaktlinsentypen. **Zusammensetzung:** PHMB 0,002%, METHYLOXIRAN/ETHYLEN-OXID-POLYMER, COCOAMPHODIPROPIONAT, PROPYLENGLYCOL, CHLORWASSERSTOFF, GEREINIGTES WASSER. Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise vor der Verwendung aufmerksam, um eine sachgerechte Anwendung dieses Medizinprodukts zu gewährleisten. **Vorsichtshinweise und Anweisungen für den Gebrauch:** Das unsterile Reinigungsmittel sollte zusammen mit einer sterilen Mehrzweck-Spüllösung für Kontaktlinsen verwendet werden. Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen. Nicht anwenden, wenn die Verschlussicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Beim Öffnen des Schraubverschlusses der Flasche reißt das Garantiesiegel auf. Die Flasche vor der Verwendung schütteln. Reinigen Sie die Linsen unmittelbar nach ihrer Entnahme mit ein paar Tropfen Reinigungsmittel. Reiben Sie die Linse 30 Sekunden lang vorsichtig zwischen Ihrer Handfläche und Ihrem Finger. Spülen Sie die Linse nach dem Reinigen auf beiden Seiten mit einer sterilen Mehrzweck-Spüllösung für Kontaktlinsen. Nach dem Spülen können die Kontaktlinsen eingesetzt werden. Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen. **Lagerungsbedingungen:** Innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch verbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Warnhinweise und Gegenanzeigen:** Setzen Sie die Linsen nach Verwendung des Reinigungsmittels nicht direkt ein, ohne sie vorher mit einer sterilen Pflegelösung für Kontaktlinsen abgespült zu haben. Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat. Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge anwenden. Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist (siehe Abbildung 1). Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Ändern Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten. Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

500036_LAB_REV02_20230703



eyecare company AG
Postfach 501405
50974 Köln
www.eyecare-company.de



Barnaux Healthcare B.V.
Vluchtoord 38
NL-5406 XP Uden



01REFM068400402
05/2023



Siehe unten



0344



4 260090 550229