

Mesalt®

Medicazione con cloruro di sodio per la detersione di ferite infette


Tessuto non tessuto di viscosa / poliestere assorbente

- Impregnata di cloruro di sodio




Mesalt® stimola efficacemente la pulizia delle ferite infette che scaricano e scaricano pesantemente.


Come si usa Mesalt®

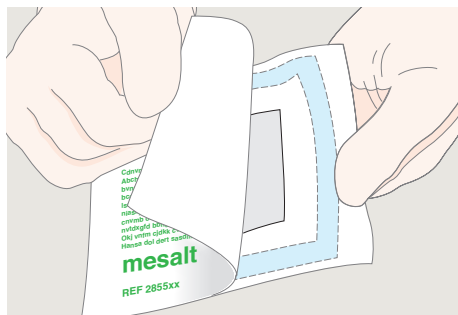

1. Detergere la ferita e aprire la confezione

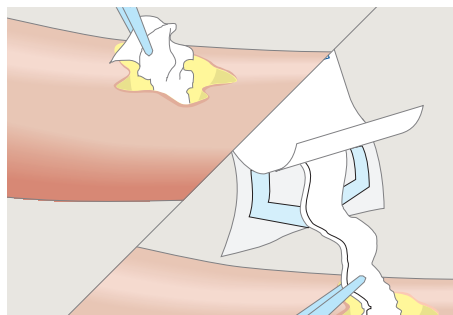

2. Applicare Mesalt® (asciutta) sulla ferita o inserire in cavità. Non bagnare prima dell'applicazione

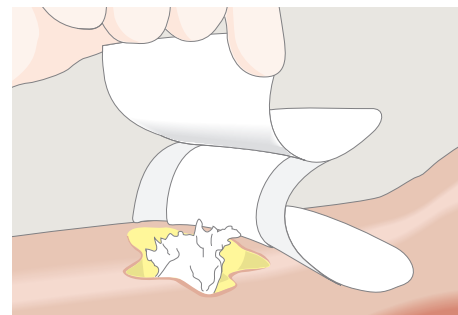

3. Applicare Mepilex® Border come una medicazione secondaria assorbente. In relazione alla quantità di essudato, Mesalt viene di solito sostituita una volta al giorno o più frequentemente se necessario.

Come agisce Mesalt

Lo scarico dalla ferita libera il cloruro di sodio dalla medicazione. Mesalt stimola efficacemente la pulizia delle ferite nella fase infiammatoria assorbendo essudato, batteri e materiale necrotico dalla ferita, facilitando così il naturale processo di guarigione della ferita.

Aree di utilizzo

Mesalt è ideale per la gestione di ferite esudanti, infette in fase infiammatoria, quali:

- Ulcere da pressione
- Ferite chirurgiche


Benefici Mesalt

- Stimola lo sbrigliamento
- Riduce la carica batterica
- è facile da applicare

Note

Non usare Mesalt su ferite asciutte.

L'utilizzo di Mesalt è descritto in molto studi, disponibili presso Mölnlycke Health Care su richiesta.

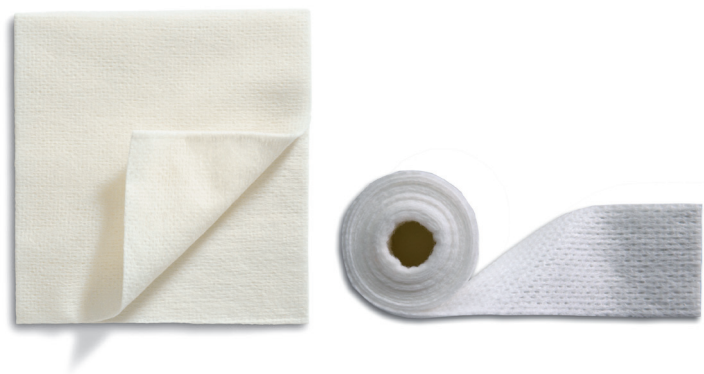

Mesalt (confezionamento sterile in busta singola)

Codice ordine	Formato (cm)	Medicazioni per confezione	Medicazioni per TRP
Mesalt			
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	240
Codice ordine	Formato (cm)	Medicazioni per confezione	Medicazioni per TRP
Versione cavitaria			
285280	2 x 100	10	60

Per saperne di più: www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac e Hydrolock sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWC00011908


Mölnlycke®