

EXCILOR®

WARTS 2in1 TRATTAMENTO

ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE



Dispositivo



Sacchettino applicatori (spugnette)



Istruzioni per l'uso

DI COSA HAI BISOGNO?



Fazzolettini



Timer

2 PRODOTTI IN 1 DISPOSITIVO

Prodotto 1: CRIO

Applicatore (spugnetta)

Serbatoio Crio

Giorno
1

Prodotto 2: APPLICATORE GEL

Applicatore Gel

Giorno
2

Giorno
3

Giorno
4

Giorno
5

Bambini
1 applicazione al giorno

Adulti
2 applicazioni al giorno

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

In caso di dubbi, contattare il proprio medico curante o il farmacista.



Video Istruzioni

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1

Non utilizzare Excilor® Warts trattamento 2 in 1

- Se la verruca si trova in una zona diversa da mani o piedi;
- Su pelle lesa, irritata, infiammata o che mostri segni di infiammazione come prurito o gonfiore;
- Su fibromi, nei, macchie scure della pelle, lentiggini e mollusco contagioso (molluscum contagiosum), cheratosi seborroica (Verruca seborroica), o pelle esfoliata
- Se non si è sicuri che si tratti di una verruca
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno dei componenti

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Da utilizzare solo per verruche su mani e piedi.
- Non ingerire o inalare l'agente di congelamento, utilizzare solo in posti ben ventilati.
- Utilizzare in combinazione solo con gli applicatori (spugnette) forniti.
- Non applicare eccessiva pressione quando si utilizza l'applicatore (spugnetta) sulla verruca.
- Utilizzare l'applicatore (spugnetta) per un massimo di 20 secondi su una verruca comune, e un massimo di 40 secondi su una verruca del piede. (Vedi la sezione: «COS'È UNA VERRUCA?»).
- Non tamponare con l'applicatore (spugnetta) la zona attorno alla verruca.
- L'applicatore (spugnetta) è per uso singolo.
- L'agente di congelamento è infiammabile e può causare congelamenti sulla pelle sana.
- Non tenere il serbatoio crio vicino al viso, su parti del corpo o indumenti.
- Tenere lontano da fiamme libere, fonti di ignizione, fonti di calore, luce solare diretta e fonti elettrostatiche ed elettriche. Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 50 °C.
- Non fumare, né accendere sigarette nelle vicinanze del prodotto.
- Non perforare, né bruciare il compartimento crio, neppure dopo l'uso.
- Il trattamento gel contiene un acido corrosivo.
- Evitare il contatto con gli occhi e con le mucose. Nel caso in cui il gel venga a contatto accidentalmente con occhi o mucose, sciacquare abbondantemente con acqua e richiedere assistenza medica.
- Evitare il contatto con la pelle sana che circonda la verruca. Si può usare un unguento come la vaselina per proteggere l'area circostante prima di applicare il gel.
- Se il gel entra in contatto con la pelle sana, **lavare immediatamente la zona d'interesse con sapone e acqua in abbondanza in modo da prevenire irritazioni o sensazione di bruciore della pelle sana.**
- Se si ha difficoltà nell'applicare il gel con precisione, ad esempio sulla pianta del piede, chiedere assistenza.
- Evitare il contatto del gel con vestiti, gioielli, tessuti o mobili in quanto potrebbe danneggiarli.
- Lavarsi le mani (ad eccezione dell'area trattata) immediatamente dopo l'uso. Se si sta trattando una verruca sulle mani, attendere 5 minuti.
- Dopo l'uso, potrebbero essere rimasti residui di gel nel dispositivo, quindi, è consigliato aprire e chiudere il dispositivo con attenzione.
- Non esporre la zona trattata alla luce solare finché la pelle non è tornata alla normalità. Questo potrebbe richiedere dalle 4 alle 6 settimane. L'iper- o ipo-

pigmentazione della pelle può verificarsi a causa dell'esposizione alla luce solare.

- Non toccare, né spremere la zona di pelle infettata, in quanto le verruche sono contagiose. Non staccare la crosta, dovrà cadere da sola.
- Per questione di igiene personale il trattamento deve essere utilizzato da una sola persona.
- Consultare il proprio medico di famiglia se:
 - la sensazione di bruciore persiste;
 - la verruca non è scomparsa dopo 3 cicli di trattamento;
 - si verifica un'irritazione, arrossamento o in caso di dolore.

COSA ASPETTARSI

Durante il trattamento, nella zona dove si tratta la verruca, si formerà uno strato calloso (strato di pelle indurito). Questo strato calloso si assottiglia gradualmente. Una vescica, che potrebbe non essere visibile a occhio nudo, potrebbe apparire sotto la verruca. Quando questo si verifica, la pelle ispessita della verruca e il suo agente causale scompariranno. Per verificare se la verruca è stata rimossa, è possibile immergere la zona trattata in acqua tiepida per 5 minuti e strofinare accuratamente il callo con una lima abrasiva. Se la pelle non mostra piccoli punti neri (piccoli vasi sanguigni, tipici della verruca), la verruca è stata rimossa. Questo callo non è una verruca. Il callo potrebbe richiedere un paio di settimane prima di sparire. La pelle sana apparirà più liscia, leggermente rosata e riacquisterà il suo colore naturale nelle seguenti settimane.

COS'È UNA VERRUCA?

Le verruche comuni (verruca vulgaris) e le verruche plantari (verruca plantaris) appaiono sulla pelle come piccole escrescenze rugose, causate dall'infezione da papillomavirus umano (HPV). Le verruche comuni si verificano per lo più sulle mani, le dita delle mani o dei piedi. Le verruche plantari si sviluppano principalmente sulla pianta del piede o sul tallone e tendono ad essere più piatte, più dure e sono spesso dolorose quando si cammina o si sta in piedi. Entrambe sono altamente contagiose e colpiscono tre persone su quattro nell'arco della vita.

COME FUNZIONA EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1?

Excilor® Warts trattamento 2 in 1 è un dispositivo medico di auto medicazione per il trattamento efficace e rapido di verruche comuni e plantari. Excilor® Warts Trattamento 2 in 1 contiene un prodotto con un agente di congelamento e un prodotto gel, a base dell'ingrediente attivo TCA-Active™, unendo la crioterapia e il trattamento con gel in un unico dispositivo. Attaccando la verruca sia attraverso il congelamento rapido del nucleo che tramite la desquamazione della pelle infetta, si combinano i due trattamenti comunemente usati per l'ottenimento di risultati più rapidi. Sia la pelle ispessita della verruca che l'agente causale saranno rimossi lasciando un nuovo strato di pelle sana.

INTERAZIONE CON ALTRI TRATTAMENTI E/O FARMACI

Non utilizzare con altri trattamenti per verruche. Non sono note interazioni con altri medicinali, se il prodotto viene utilizzato come da foglietto illustrativo.

CHI PUO' USARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1?

Excilor® Warts trattamento 2 in 1 può essere utilizzato da adulti e bambini a partire dai 4 anni. Nei bambini, si raccomanda l'applicazione del trattamento da parte di un adulto. Durante la gravidanza e l'allattamento o nel caso di paziente diabetico, di problemi di cattiva circolazione del sangue o di malattie della pelle si raccomanda di consultare il proprio medico di famiglia prima dell'uso.

QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI?

Se usato su pelle sana, può provocare una sensazione di prurito, lieve bruciore o dolore nell'area trattata, che può causare danni alla pelle. Nel caso in cui la sensazione di prurito, bruciore o dolore continui fino alla successiva applicazione, il trattamento deve essere interrotto.

- Le complicazioni non sono frequenti. È estremamente raro che si verifichi un segno permanente o una cicatrice. Questo potrebbe essere in gran parte correlato ad un'anomalia nel processo di guarigione o ad un'infezione. In tal caso, consultare il medico di famiglia.
- Come in tutti i trattamenti crioterapici, la pelle potrebbe diventare bianca temporaneamente.
- L'applicazione dell'agente di congelamento può causare una sensazione di bruciore, prurito e/o dolore durante e dopo il congelamento, che diminuisce rapidamente dopo il disgelo dell'area.
- La sovraesposizione all'agente di congelamento potrebbe causare danni agli strati superiori della pelle, con conseguenti cicatrici e/o danni ai nervi.

INGREDIENTI

Cryo-Active™, TCA-Active™ (basato su Acido tricloroacetico), Carbopol, Acqua

COME CONSERVARE IL PRODOTTO

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere lontano dalla luce solare.

Tenere lontano da fiamme, fonti di ignizione, fonti di calore, luce solare diretta e fonti elettrostatiche ed elettriche. Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 50 °C.

Pulire accuratamente la punta dell'applicatore gel con un fazzoletto dopo ogni utilizzo e chiudere attentamente il dispositivo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul dispositivo e sulla scatola esterna. Dopo la prima apertura, il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi, non superare la data di scadenza.

COSA CONTIENE LA SCATOLA?

- 1 dispositivo contenente 2 prodotti:
 - un serbatoio crio da 11,5 ml con applicatore
 - un applicatore gel (TCA-Active™) da 1 ml
- Sacchettino contenente 5 applicatori (spugnette)
- Foglietto illustrativo

COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1?
Leggere il retro del foglietto illustrativo ➡

COME UTILIZZARE EXCILOR® WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1?

Giorno 1: applicare la crioterapia ❄️. Adulti e bambini: **1 sola volta**.

Giorno 2, 3, 4, 5: applicare il trattamento gel 💧. Adulti: 2 volte al giorno; Bambini: 1 volta al giorno.

Se usato per la prima volta, si consiglia di trattare inizialmente una sola verruca prima di trattare molteplici verruche, in modo da testare l'effetto sulla propria pelle. Iniziare a trattare un'altra verruca solo se non si verificano effetti collaterali (normalmente entro 5 giorni). Se ci sono più verruche vicine tra di loro (entro 1 cm), attendere fino a quando la pelle non sia guarita prima di trattare l'altra verruca (questo può richiedere fino a 6 settimane).

Se la verruca non scompare completamente, il trattamento può essere ripetuto fino a 3 volte. Ripetere l'intero programma di trattamento dopo un intervallo di minimo 4 giorni fino a 1 settimana. Vedere: «COSA ASPETTARSI?» per giudicare se la verruca sia stata completamente rimossa o meno.

Nota: Quando si tratta una verruca coperta da un callo, si consiglia di immergere il piede in acqua tiepida per 5 minuti e strofinare accuratamente il callo con una lima abrasiva prima del trattamento.

Giorno 1 - CRIO | Prodotto 1

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO:




1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso o vedere il video. Rimuovere l'adesivo di sicurezza.



istruzioni video



2. Aprire il prodotto 1. Girare da 🔒 → 🔓.

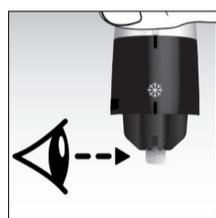

3. Controllare l'applicatore (spugnetta) all'interno.

NOTA: Se usato una seconda volta, inserire una nuova spugnetta nel supporto. Non riutilizzare lo stesso applicatore (spugnetta).

APPLICARE IL TRATTAMENTO:

NOTA: leggere i passaggi 4-8 prima di procedere! Usa un timer.



4. Posizionarsi su un tavolo durante l'intera procedura.



5. Allineare i simboli ❄️, non girare né premere.



6. Premere fermamente per 1 secondo. Poi sollevare la parte nera dell'applicatore, staccandola dal compartimento blu della crio.

NOTA: Se viene premuto per troppo tempo, il liquido freddo (innocuo) fuoriuscirà dal dispositivo. Questo liquido è molto freddo, ma non dannoso. Lavare immediatamente se entra in contatto con la pelle sana.

1 sec.



7. Aspettare 20 secondi per raggiungere la temperatura ottimale, apparirà una condensa ghiacciata e innocua.

20 sec.




8. Premere con delicatezza sulla verruca per 20 secondi.

NOTA: premere per 40 secondi su verruche plantari.

20 sec.

DOPO IL TRATTAMENTO:

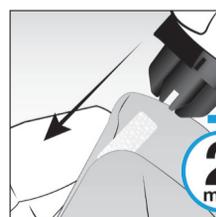

9. Aspettare 2 minuti prima di rimuovere con un fazzoletto l'applicatore (spugnetta) e buttarlo.

NOTA: per trattare un'altra verruca ripetere dal passaggio 3.

2 min.




10. Bloccare il dispositivo. Ruotare finché 🔓 → 🔒 non si sente un click. **Non premere verso il basso.**




Giorno 2, 3, 4, 5 - GEL | Prodotto 2

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO:

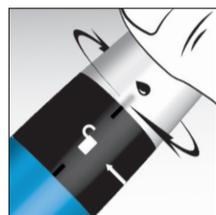

1. Aprire il prodotto 2. Allineare 💧 con 🔒 e tirare per aprire.

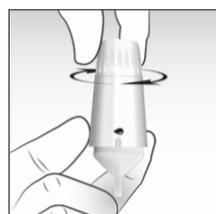


2. - Tenere il dispositivo in **posizione verticale**.
- Girare la manopola in senso orario.
- Girare e fare una breve pausa per disperdere il gel dalla punta.
- Pulire la punta e girare una sola volta per una dose accurata.

NOTA: Quando viene utilizzato per la prima volta: potrebbero essere necessari alcuni (fino a 8) giri completi per creare una pressione sufficiente per rompere la chiusura ermetica e rilasciare il gel nella punta.


APPLICARE IL TRATTAMENTO:

NOTA: leggere i passaggi 3-8 prima di procedere! Usa un timer.

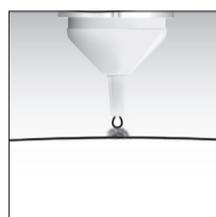

3. Applicare **una goccia (un click) rigorosamente** sulla verruca. Se la goccia non copre l'intera verruca, applicare un'altra goccia di gel.


Se il gel corrosivo accidentalmente entra in contatto con la pelle sana, lavare immediatamente l'intera zona con acqua e sapone in abbondanza per evitare irritazioni o la sensazione di bruciore della pelle sana.

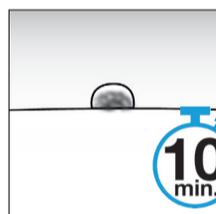


4. Aspettare 10-15 minuti prima di mettere calze, scarpe o guanti.

10 min. ~ 15 min.

DOPO IL TRATTAMENTO:

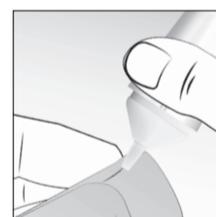

5. Pulire il beccuccio con un fazzoletto.

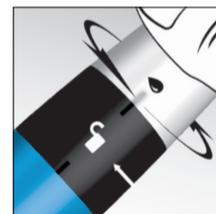

6. Bloccare il dispositivo.



7. Evitare l'esposizione alla luce solare per 4-6 settimane.



8. Ripetere il trattamento **2 volte al giorno per 4 giorni**.

NOTA: Per bambini tra i 4-12 anni: applicare il gel **1 volta al giorno**.

PRODUTTORE
Medical Brands
Innovations B.V.,
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam,
the Netherlands.

DISTRIBUTORE
Vemedica Pharma S.R.L.
Viale Mentana 43, 43121
Parma (PR), Italia

Ultima modifica del foglietto
illustrativo: Dicembre 2017

CE 0086

100CA.VE.IT.00