

Sanopin®-Inhalator

Bedienungsanleitung



Der Sanopin®-Inhalator besteht aus einem Inhalationsaufsatz, einem Außen- und Innentopf.

1. Stellen Sie den Außentopf des Inhalators kippsicher auf und setzen Sie den Innentopf mittels Haltetaschen in den Außentopf hinein. Geben Sie die erforderliche Menge der zu inhalierenden Flüssigkeit in den Innentopf. Beachten Sie hierbei die vorgeschriebene Dosierung des verwendeten Inhalationszusatzes.
2. Gießen Sie dann heißes Wasser dazu, so dass der Innentopf bis zur Markierung gefüllt ist.
3. Setzen Sie den Inhalationsaufsatz auf den Außentopf und sichern Sie die Verbindung zwischen Inhalationsaufsatz und Außentopf durch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn. Hierbei ist zu beachten, dass der Drehverschluss auf der rechten und linken Seite fest ineinander geschoben wird. Bitte überprüfen Sie die Verschlussicherheit! Bitte beachten Sie auch, dass die Haltetaschen des Innentopfes nicht die Luftschlitze des Außentopfes verdecken.
4. Legen Sie Nase und Mund so an die Öffnung, dass diese gut abschließt. Beginnen Sie mit der Inhalation.
5. Nach jedem Atmen ist eine Atempause von 1-2 Sekunden einzulegen.

Hinweise:

- > Heizquellen sind im und am Inhalator nicht zu verwenden.
- > Der Inhalator ist kippsicher aufzustellen. Ein Transport des Inhalators sollte nicht mit heißem Medium erfolgen. Ein Transport sollte stets an den Griffen erfolgen (Verbrühungsgefahr!).
- > Die Einbringung von Mund und Nase in die Inhalatoröffnung erfolgt durch leichtes Auflegen auf die Ränder, hierbei sollte kein Druck ausgeübt werden.
- > Der Inhalator gehört nicht in Kinderhände, Kinder dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener inhalieren (Verbrühungsgefahr!).
- > Der Innentopf des Inhalators ist stets vor der Befüllung mit dem Medium in den Außentopf einzusetzen. Nach Gebrauch ist der Inhalator gründlich zu reinigen!
- > Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben der Gebrauchsinformation des jeweiligen Inhalationszusatzes.

Der Inhalator trägt die CE-Kennzeichnung.