

## TRUEyou Kontrollösungen

### **Verwendungszweck:**

TRUEyou Kontrollösung dient zur Funktionskontrolle von TRUEyou Teststreifen bzw. den Blutzucker Mess-Systemen TRUEyou und TRUEyou mini.

### **Messprinzip:**

Verwenden Sie die Kontrolle anstelle von Blut, um zu prüfen, ob Ihr Mess-System korrekt arbeitet. Wenn das vom Mess-System angezeigte Ergebnis im Bereich der auf dem Teststreifen-Röhrchen angegebenen Kontrollwerte liegt, arbeiten System und Teststreifen einwandfrei.

### **Lagerung und Handhabung:**

Die Kontrollösung muss aufrecht und fest verschlossen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. NICHT IM KÜHLSCHRANK ODER GEFRIERSCHRANK AUFBEWAHREN. Temperaturbereich 2-30° Celsius. Notieren Sie sich das Öffnungsdatum der Flasche und verwenden Sie diese dann nicht länger als auf der Verpackung angegeben. Verwenden Sie keine undichten oder beschädigten Kontrollösungen.

**Inhalt:** 3 ml

### **Chemische Zusammensetzung:**

Wasser, D-Glukose, Puffer, viskositätsverstärkendes Agens, Salze, Farbstoffe und Konservierungsstoffe.

### **TRUEyou Kontrollösung 1**

Artikelnummer: NDI-E5157-80-TRYUU

Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 1

PZN: 92 80 946

### **TRUEyou Kontrollösung 2**

Artikelnummer: NDI-E5157-81-TRYUU

Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 2

PZN: 92 80 923

### **TRUEyou Kontrollösung 3**

Artikelnummer: NDI-E5157-84-TRYUU

Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 3

PZN: 92 80 917