

# cyclotest® Schwangerschaftstest – Digital


## Ein-Stufen-Schwangerschaftstest

Zu jeder Tageszeit anwendbar – bis zu 4 Tage vor Fälligkeit der Periode. Teststab für 10 Sekunden in die Harnprobe eintauchen. Ergebnis nach 5 Minuten ablesen.

PZN 15258520




### Anwendung:

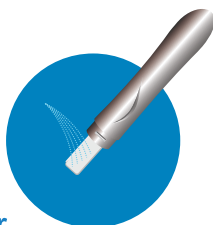

oder  
or  
veya  
ИЛИ

10 sec.

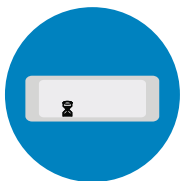

5 min.

25 mIU/ml hCG

- In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
- Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Gebrauchsanleitung beachten

schwanger

schwanger • pregnant • hamile •  
беременная

nicht schwanger

nicht schwanger • not pregnant  
hamile değıl • не беременная

Fehler

ungültig invalid geçersiz недействительно  
Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung. •

2019-06